

PENSI

Made in Finland



Parensi paarit lattialukituksella



KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Ennen laitteen käyttöä lue ohjeet ja
pidä ne saatavilla myöhemmän tarpeen varalle.

Ohjeversio 3.0
17-05-2021















SISÄLLYSLUETTELO

SYMBOLIT	4
1. YLEISTÄ	5
1.1 Laitteen nimi	5
1.2 Laitteen valmistajan nimi ja yhteystiedot	5
1.3 Vastuuvapauslauseke	6
1.4 Vaatimustenmukaisuus	6
1.5 Käyttö- ja huolto-ohjeen saatavuus	6
2. TUOTETIEDOT	7
2.1 Suunniteltu käyttötarkoitus	7
2.2 Suunnitellut käyttäjät	8
2.3 Vasta-aiheet	9
2.4 Tekniset tiedot	9
2.5 Kuljetus ja varastointi	10
2.6 Vakiovarusteet	10
2.7 Lisävarusteet	10
2.8 Kliiniset hyödyt	11
2.9 Sarjanumeron sijainti	11
3. LAITTEEN KÄYTTÖ	12
3.1 Ennen käyttöä	12
3.2 Ergonomia	13
3.3 Käyttö- ja huoltokoulutus	14
3.4 Parensi parien käyttö	14
3.4.1 Parensi parien toiminnot	15
3.4.2 Parien poistaminen ajoneuvosta	16
3.4.3 Parien nostaminen ja laskeminen	16
3.4.4 Parien säätöjen käyttö	18
3.4.5 Parien lastaaminen ja kiinnittäminen ajoneuvoon	19
3.4.6 Yli 150 kg painavien potilaiden kuljettaminen	20
3.4.7 Lapsipotilaat	20
3.4.8 Suojalakanan käyttö	20
4. VARAOSAT	21
4.1 Varaosien vaihto	21
4.2 Varaosaluettelo	22

5.	PUHDISTUS.....	24
6.	KUNNOSSAPITO JA HUOLTO.....	26
7.	KÄYTTÖSTÄ POISTO JA HÄVITTÄMINEN	28
8.	TAKUUEHDOT	29
	LIITE 1 . KÄYTTÖKOULUTUS - PEREHDYTTÄMISLISTA	30
	LIITE 2. HUOLTOLISTA	31

SYMBOLIT

Alla kuvataan symbolit, joita käytetään tässä käyttö- ja huolto-ohjeissa, laitteen tyyppikilvessä tai muissa merkinnöissä.

	Huomio. Antaa lisätietoja ja selventää ohjeita.
	Varoitus. Mahdollisesti vaarallinen tilanne joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan, jos tilannetta ei vältetä erityistoimilla.
	Varoitus. Mahdollisesti vaarallinen tilanne joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen tai laitteen vaurioitumiseen, jos tilannetta ei vältetä erityistoimilla.
	Varoitus (tyyppikilvessä). Käyttäjän on katsottava käyttöohjeista tärkeät tiedot, kuten varoitukset ja varotoimet.
	Lääkinnällinen laite
	Valmistaja
	Katso käyttöohje
	Viimeinen käyttöpäivä VVVV-KK
	Maksimilastauskapasiteetti
	Tuotenumero
	Sarjanumero
	CE-merkki

1. YLEISTÄ

Tämä ohje auttaa sinua käyttämään ja huoltamaan Parensi paareja oikein, sekä käyttöiän päättymisen jälkeen poistamaan ne käytöstä asianmukaisesti.



VAROITUS

Lue ohjeet ennen kuin käytät tai huollat laitetta. Paarien väärä käyttö voi aiheuttaa vahinkoja potilaille, muille käyttäjille tai laitteelle.

Tässä ohjeessa ei anneta ohjeita potilaan lääketieteellisestä hoidosta. Käyttäjällä tulee olla koulutus ja/tai tieto kuljetettavan potilaiden lääketieteellisestä hoidosta.

Tässä ohjeessa ei ole mahdollista kuvata kaikkia tilanteita joihin käyttäjä voi potilasta tieliikenneajoneuvoon siirtäessään joutua. Lisäksi yksin paareja käytettäessä käyttäjän tulee itse huolehtia tietyissä tilanteissa tarvittavasta lisäkäyttäjistä tämän ohjeen mukaisesti.

1.1 Laitteen nimi

Parensi paarit

1.2 Laitteen valmistajan nimi ja yhteystiedot

Nimi: Pensi Rescue Oy

Osoite: Ahertajankatu 5, 38250 Sastamala

Puhelin: +358 (0)3 512 5600

Sähköposti: pensi@pensi.fi

Ota yhteys valmistajaan, jos tarvitset apua ohjeiden ymmärtämisessä, et löydä etsimiäsi tietoja, haluat tilata varaosia tai huollon.

Ottaessasi yhteyttä valmistajaan, ilmoita Parensi paarien sarjanumero. Löydät sarjanumeron kappaleen 2.9 *Sarjanumeron sijainti* avulla.

1.3 Vastuuvapauslauseke

Käyttäjä ja/tai käyttäjäorganisaatio vastaa laitteen turvallisesta ja oikeasta käytöstä. Ennen paarien käytön aloittamista, käyttäjäorganisaation on huolehdittava, että kaikilla käyttäjillä on koulutus tuotteen turvalliseen ja oikeaan käyttöön. Valmistajan vastuu raukeaa kokonaisuudessaan seuraavista syistä:

- Paareja on käytetty tämän käyttö- ja huolto-ohjeen vastaisesti,
- Paareihin on tehty rakenteellisia muutoksia ilman valmistajan kirjallista lupaa tai ohjetta,
- Paareissa on käytetty muita kuin valmistajan toimittamia varaosia,
- Paarit on kiinnitetty ajoneuvoon muista kuin koritehtaan kirjallisesti hyväksymistä ajoneuvossa olevista kiinnityspisteistä,
- Paarien säännöllinen huolto tai käyttäjien käyttökoulutus on laiminlyöty,
- Paareja ei ole toimitettu tarkastukseen/huoltoon Pensille tai Pensin valtuuttamalle edustajalle, mikäli ammattimainen huoltohenkilö ei pysty tarkastamaan/huoltamaan paaria,
- Paareja on ylikuormitettu, tai
- Paareja on käytetty maksimikäyttöään jälkeen.

Käyttäjä ja/tai käyttäjäorganisaatio vastaa yksinään edellä mainittuihin syihin sisältyvistä riskeistä ja vahingoista. Käyttöohjeiden huomiointi ja noudattaminen ovat osana nimettyä käyttötarkoitusta sekä takuuehdoja.

Tämä käyttö- ja huolto-ohje on pidettävä lukemisen jälkeenkin saatavilla. Mikäli paarit myydään eteenpäin, vastaa sen hetkinen myyjä siitä, että myös käyttö- ja huolto-ohje sekä paarien vuosittainen tarkastusdokumentaatio toimitetaan paarien mukana.

1.4 Vaatimustenmukaisuus

Parensi paarit täyttävät lääkinällisten laitteiden asetuksen MDR (EU) 2017/745 vaatimukset ja ne ovat luokan I CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita.

Parensi paarit noudattavat standardia SFS-EN 1865-2 soveltuvin osin.

Mikäli paareihin on tehty rakenteellisia muutoksia ilman valmistajan kirjallista lupaa tai ohjetta, edellä mainitut vaatimukset eivät enää täyty.

1.5 Käyttö- ja huolto-ohjeen saatavuus

Tämä käyttö- ja huolto-ohje on saatavilla Pensin www-sivuilta <http://www.pensi.fi>
Pyydä latausohjeet Pensiltä.



HUOMIO

Käyttäjälle siirtyvät valmistajan vastuut, jos hän

- asettaa laitteen saataville markkinoilla omalla nimellään, rekisteröidyllä toiminimellään tai rekisteröidyllä tavaramerkillään, lukuun ottamatta tapauksia, joissa valmistajan kanssa on tehty sopimus asiasta;
- muuttaa jo markkinoille saatetun tai käyttöön otetun laitteen käyttötarkoituksen; tai
- muuttaa jo markkinoille saatetun tai käyttöön otetun laitteen siten, että muutos saattaa vaikuttaa siihen, onko laite sovellettavien vaatimusten mukainen.

Käyttäjän ja/tai potilaan pitää ilmoittaa kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet sekä valmistajalle että sen EU-jäsenmaan valvovalle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas ovat.

2. TUOTETIEDOT

2.1 Suunniteltu käyttötarkoitus

Parensi parit on tarkoitettu kiireettömään potilaan siirtämiseen tieliikenneajoneuvon ulkopuolella ja kuljettamiseen tieliikenneajoneuvossa, jotta voidaan varmistaa potilaan ja ammattimaisen hoito- tai kuljetushenkilöstön turvallisuus kuljetuksen ja siirron aikana.

Kuljettamiseen tieliikenneajoneuvoissa tulee käyttää Pensin hyväksymää yhteensopivaa kiinnitysjärjestelmää, jonka kiinnitys ajoneuvoon on hyväksytty koritehtaan toimesta.



VAROITUS

Käytä paareja vain siihen tarkoitukseen mitä tässä ohjeessa on kuvattu. Paarien väärä käyttö voi aiheuttaa vahinkoja potilaalle, muille käyttäjille tai laitteelle.

2.2 Suunnitellut käyttäjät

Parensi parien suunnitellut käyttäjät ovat ammattimainen hoito-, kuljetus- ja huoltohenkilöstö sekä potilaat.

Suunnitellut pääkäyttäjät ovat ammattimainen hoito- tai kuljetushenkilöstö, jotka ammatikseen hoitavat tai kuljettavat parikuljetusta tarvitsevia potilaita. Heillä on lääketieteellinen koulutus tai tietotaito vamman tai toimintarajoitteen omaavien henkilöiden kuljettamiseen ambulanssissa tai muussa parikuljetukseen suunnitellussa ja hyväksytyssä ajoneuvossa.

Suunniteltuja käyttäjiä ovat myös ammattimainen huoltohenkilöstö, jolla on riittävät tekniset tiedot ja taidot vastaavien tuotteiden huollosta.

Potilaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamma tai toimintarajoite jonka lieventämisen tai kompensoinnin takia tarvitaan parikuljetusta. Potilas itse ei koskaan käytä parin toimintoja, vaan on aina loppukäyttäjä, johon parikuljetus kohdistuu.



VAROITUS

Paareja saavat käyttää ainoastaan näihin tehtäviin koulutetut ammattimaiset käyttäjät.

Käyttökoulutusohjeet löydät kappaleesta 3.3 Käyttö- ja huoltokoulutus.



VAROTOIMI

Käyttökoulutus tulee dokumentoida käyttäjäorganisaation toimesta ja koulutusdokumentti tulee säilyttää käyttäjäorganisaatiolla todisteena käyttäjien kouluttamisesta.

2.3 Vasta-aiheet

Laitetta ei ole tarkoitettu:

- pidempiaikaiseen käyttöön ajoneuvon ulkopuolella, esimerkiksi sänkynä sairaalassa tai sairaalakäytössä osastojen välillä
- bariatristen potilaiden siirtämiseen tai kuljettamiseen
- kuluttaja-/yksityiskäyttöön
- käytettäväksi ilma-aluksissa tai helikoptereissa
- käytettäväksi sotilaskäyttöön tarkoitetuissa ajoneuvoissa
- kannettavaksi pariiksi eikä käytettäväksi portaissa
- hätätilapotilaiden kuljettamiseen
- nostettavaksi nosturilla
- muun kuin selinmakuulla olevan potilaan kuljettamiseen.


2.4 Tekniset tiedot

Kokonaispituus	140-194 cm
Rungon leveys	54 cm (polkimien kanssa 65 cm)
Korkeus (alin-ylin)	50-84 cm
Paino	n. 50 kg (ilman patjaa ja potilasvöitä)
Max. lastauskapasiteetti	230 kg (= potilas + patja + vyöt + muut mahdolliset varusteet)
Tuotteen maksimikäyttöikä	8 vuotta*

* Edellyttäen että tuotetta on käytetty normaaliolosuhteissa, huollettu ja huolto dokumentoitu ohjeiden mukaan ja että se edelleen täyttää käyttöhetkellä voimassaolevat vaatimukset (esim. standardit).

Parensi parit on suunniteltu ja testattu käytettäväksi ajoneuvossa yhdessä Pollux Carrier Floor Anchor (valmistaja: Mago Scandinavia Ab, Ruotsi) lattialukituksen kanssa.

A = n. 194 cm
B = n. 50 cm
C = n. 65 cm
D = n. 65 cm

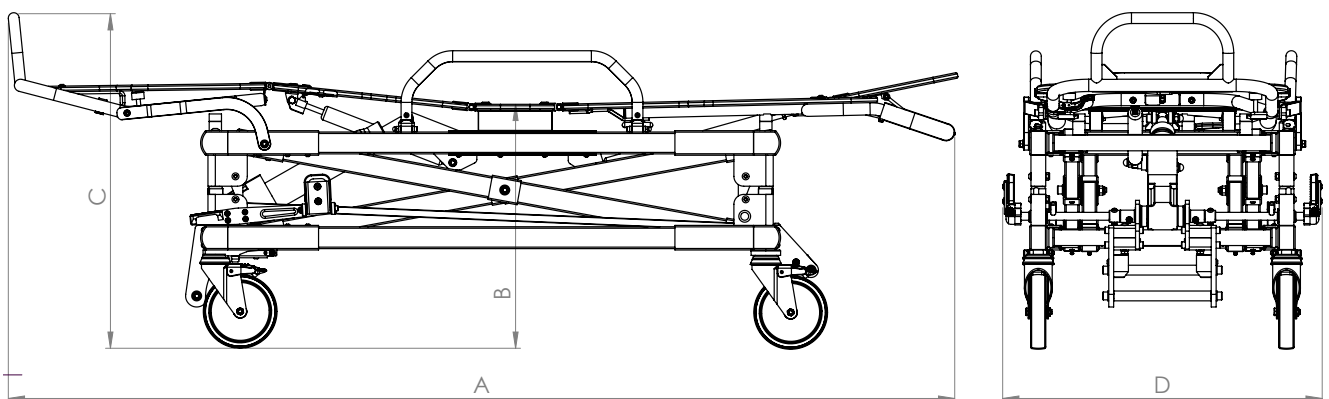

2.5 Kuljetus ja varastointi

Tarkasta heti tuotteen saavuttua ja ennen mahdollista varastointia että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksessa. Jos havaitset vahinkoja, ota välittömästi yhteyttä kuljetusyhtiösi reklamaatiotilanteessa. Ota myös yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan vaurioiden arvioimiseksi ja korjaamiseksi.

Varastoi tuote kuivassa ja pölyttömässä tilassa yli +10 C asteen lämpötilassa, suojattuna suoralta auringonvalolta. Varastoinnin jälkeen tarkasta aina tuotteen oikeanlainen toiminta ennen käyttöönottoa. Puhdista ja voitele tuotteen liikkuvat osat ohjeiden mukaisesti, jos tuote on ollut varastoituna yli kaksi (2) kuukautta.



HUOMIO

Älä varastoi tuotetta pitkiä aikoja alle 0 °C asteessa.

2.6 Vakiovarusteet

Vakiovarusteet joita ilman tuotetta ei saa käyttää:

Lisälaite	Tuotenumero	Kuvaus
Hygieniapatja	00 36 00	Antibakteerinen, nesteitä läpäisemätön ja paloturvallinen potilaan makuualusta.
Potilasvyöt (sis. 4-pistevyöt ja reisivyö)	32 30 02 32 30 00	Auttavat pitämään potilaan paikallaan hänen ollessaan paareilla.

2.7 Lisävarusteet

Lisävarusteet joilla saat tuotteeseen lisätoiminnallisuuksia:

Lisävaruste	Tuotenumero	Kuvaus
Nesteenantoteline	61 10 10	Potilaalle mahdollisesti annettavien infuusionesteiden ripustamista varten. Maksimikuormitus 5 kg. Nesteenantotelinettä ei tule käyttää ajon aikana, vaan nesteet on ripustettava ajoneuvon nestepussin kiinnikkeisiin.
Takavetokahva	61 12 00	Helpottaa paarien käyttöä jos esimerkiksi tarvitaan toinen käyttäjä paarien takapäähän.



VAROTOIMI

Käytä ainoastaan Pensin hyväksymiä kiinnitysjärjestelmiä ja lisävarusteita paareissa. Sopimattomien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa vaurioita ja vaaratilanteita.



2.8 Kliiniset hyödyt

Parensi parien suunnitellut kliiniset hyödyt ovat:

- kiireetön potilas saadaan turvallisesti siirrettyä paareilla ja kuljetettua tieliikenneajoneuvossa esimerkiksi eri hoitolaitosten välillä,
- ammattimainen kuljetushenkilöstö voi siirtää ja kuljettaa potilasta tehokkaasti ja ergonomisesti, ja
- potilasta voidaan siirtää turvallisella ja ergonomisella korkeudella.

2.9 Sarjanumeron sijainti

Parensi parien sarjanumero sijaitsee etummaisessa poikittaisessa runkoputkessa olevassa tyypikilvessä kohdassa SN XXXXX (kuva alla).

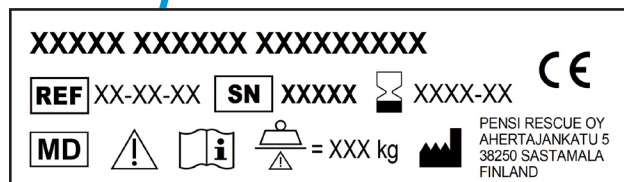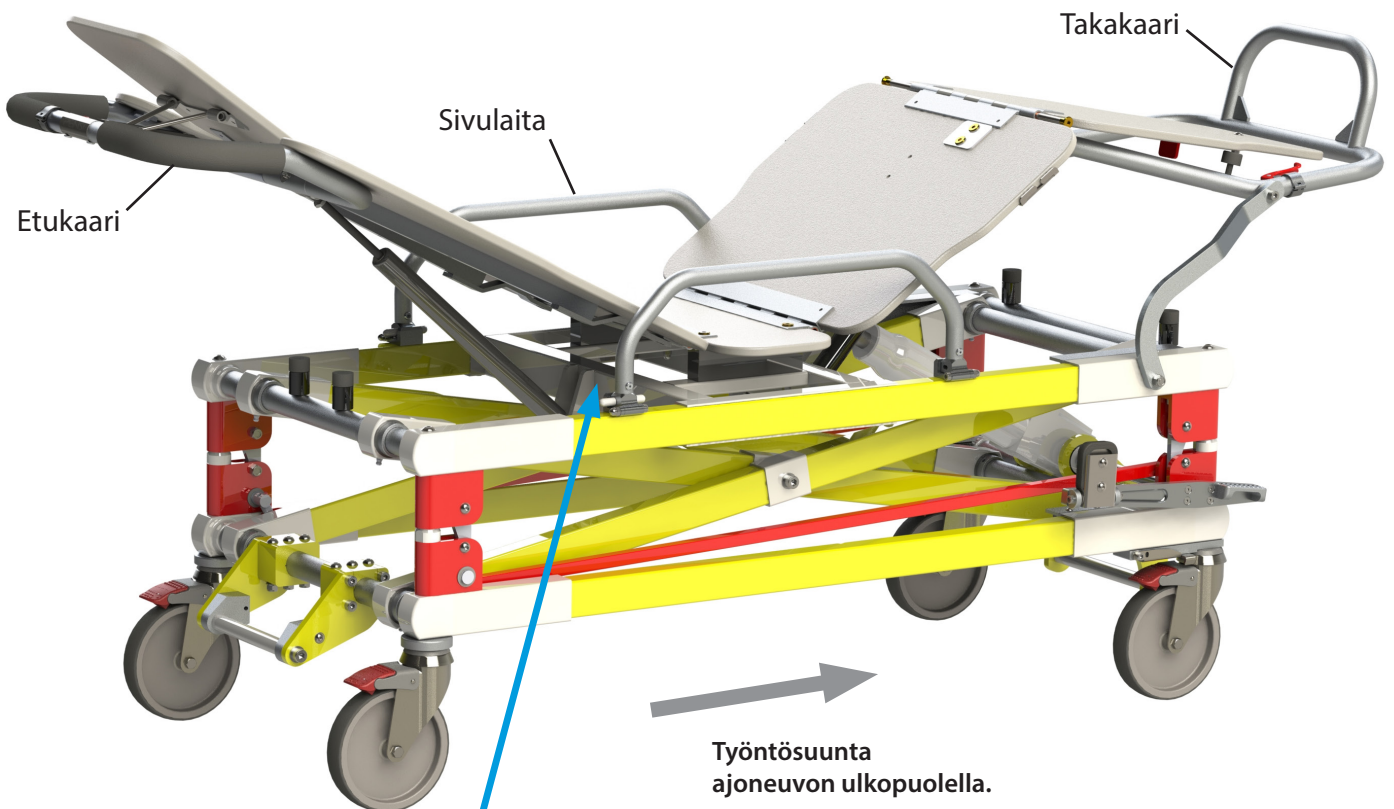

3. LAITTEEN KÄYTTÖ

3.1 Ennen käyttöä

Lue nämä ohjeet huolellisesti.



VAROITUS

Käytä paareja vain siihen tarkoitukseen mitä tässä ohjeessa on kuvattu. Paarien väärä käyttö voi aiheuttaa vahinkoja potilaalle, muille käyttäjille tai laitteelle.

Muutosten tekeminen paareihin voi aiheuttaa vaurioita ja vahinkoa. Käytä paareja vain sellaisena kuin Pensi on ne suunnitellut.

Paareja voi siirtää yksi (1) ammattimainen käyttäjä vain jos kuljettava alusta/reitti on täysin tasainen. Muuten paarien käyttö vaatii aina vähintään kaksi (2) ammattimaista käyttäjää.

Poista liikenneonnettomuudessa olleet tai maksimikäyttöään saavuttaneet parit käytöstä. Paarien omistaja vastaa paarien käytöstä poistosta, esimerkiksi poistamalla parista tyyppikilven ja merkitemällä parit käytöstä poistetuksi. Lisäksi jos tyyppikilven kaikki tiedot eivät ole luettavissa, tulee parit asettaa käyttökieltoon.

Vaihda kuluneet tai rikkiäiset vyöt välittömästi uusiin.

Älä ylikuormita tuotetta. Ylikuormitus voi aiheuttaa paareihin näkymättömän vaurion, joka voi myöhemmin aiheuttaa vahingon.

Kouluta kaikki paarien käyttäjät niiden käyttöön.

Käyttäjän tulee noudattaa käyttäjäorganisaation ohjeita henkilökohtaisten suojainten käytöstä (esimerkiksi suojakäsineet, hengityssuojaimet ja turvajalkineet).

Tarkasta ettei tuote ole vaurioitunut kuljetuksessa tai varastoinnissa.

Käytä paareja tieliikenneajoneuvossa vain Pensin ohjeiden mukaisesti kiinnitettynä Pensin hyväksymiin kiinnitysjärjestelmiin. Ajoneuvon kiinnityspisteet tulee olla koritehtaan hyväksymät.

Varmista että paarien kaikki toiminnot ovat käytettävissä ajoneuvon sisällä, ja että paarien ympärille jää tarpeeksi tilaa. Paarien kiinnitysjärjestelmän asentajan tulee varmistua siitä, että parit pitää saada ajoneuvossa täysin suoraksi, ja myös yläkeho täysin pystyasentoon. Huomio myös mahdolliset potilaat, jotka ovat paaria pidempiä.

Potilaan tulee olla paareilla aina selinmakuulla. Varmista että potilas on aina kiinnitetty tiukasti 4-pistevoilla ja reisivyöllä potilaan ollessa paareilla.

Huomioi että Parensi parit on tarkoitettu kuljetettavaksi koko ajan omilla pyörillään. Paareja ei tule missään tilanteessa nostaa tai kantaa niin että parien pyörät nousevat maasta.

Kuljeta ja siirrä Parensi paareja aina ala-asennossa. Nosta parit tarvittaessa ylä-asentoon vasta kun potilasta siirretään paareille tai paareilta.

Aseta tuote käyttökieltoon jos havaitset turvallisuutta vaarantavan vian tai puutteen ennen parien käyttöä. Ota yhteyttä koulutettuun huoltohenkilöön ja tarvittaessa jälleenmyyjään tai Pensiin korjatakseen parit ennen käyttöä.

Tee paareille tässä ohjeessa kuvatut määräaikaishuollot ja tarkistukset. Käyttäjäorganisaation tulee dokumentoida ja tallentaa tuotteelle tehdyt huollot/tarkistukset.

3.2 Ergonomia

Kiinnitä erityistä huomiota työergonomiaan tuotteen käyttöönottokoulutuksessa, koska sen avulla vähennetään käyttäjien tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja tapaturmariskejä.

Parensi parien käyttöönottokoulutus tulee olla läpikäyty tämän ohjeen liitteen 1. Perehdyttämislista - Käyttöönottokoulutus mukaisesti ennen parien käyttöä.



VAROTOIMI

Toimi yli 150 kg painavien potilaiden kanssa erityistä varovaisuutta noudattaen, vähintään kahden käyttäjän toimesta.

Käytä painaville potilaille, jotka ovat reilusti paareja leveämpiä, heille suunniteltuja paareja, jossa parien leveyttä voidaan lisätä (tällä hetkellä ei Pensin valikoimassa).

3.3 Käyttö- ja huoltokoulutus

Käyttäjäorganisaation tulee järjestää käyttökoulutus kaikille jotka käyttävät paareja. Kouluttajalla tulee olla hyvät tiedot ja taidot Parensi parien oikeasta käytöstä. Käyttäjäorganisaation tulee säilyttää yksityiskohtaiset tiedot kaikkien käyttäjien koulutuksista liitteen 1 mukaisesti.

Käyttäjäorganisaation tulee järjestää erillinen koulutus myös vastuullisille huoltohenkilöille tuotteen käytöstä sekä huollosta. Vastuullisella huoltohenkilöllä tulee olla riittävät tekniset tiedot ja taidot vastaavien tuotteiden huollosta. Teknisiä huolto- ja voiteluohjeita on ehdottomasti noudatettava. Tämä mahdollistaa paareihin merkityn maksimikäyttöajan ja minimoi huollosta ja seisokeista syntyviä kustannuksia.

Käyttäjäorganisaation tulee säilyttää yksityiskohtaiset tiedot kaikista koulutetuista huoltohenkilöistä sekä parien huoltotöistä ja tarkastuksista. Suosittelemme huollon teettämistä Pensillä.

Löydät käyttökoulutukseen tarkoitetun perehdyttämislistan tämän ohjeen liitteestä 1, ja huoltolistan liitteestä 2.



VAROITUS

Paareja saavat käyttää ja huoltaa ainoastaan koulutuksen saaneet ammattimaiset käyttäjät ja ammattimaiset huoltajat.

3.4 Parensi parien käyttö



VAROITUS

Toisen valmistajan paareille saatu koulutus ei täytä Parensi parien käyttökoulutusvaatimusta.



HUOMIO

Yksin paareja käytettäessä käyttäjän tulee itse varmistua siitä että hän pystyy tekemään kaikki suunnitellut toiminnot. Muussa tapauksessa on käytettävä vähintään kahta ammattimaista käyttäjää.

Älä työnnä paareja takavetokahvasta. Työnnä paareja aina etukaaresta.

3.4.1 Parensi parien toiminnot

Parensi parit on suunniteltu käytettäväksi omilla pyörillään kaikissa tilanteissa. Tämä lisää potilaan sekä käyttäjien turvallisuutta parien siirron aikana, koska paareja ei ole tarkoitettu kannettavaksi, siirrettäväksi eikä käytettäväksi huonolla alustalla. Parien kaikissa pyörissä on jarrut, ja takapään pyörissä on lisäksi mahdollisuus lukita pyörät parien rungon suuntaisesti. Tämä ns. suuntalukitus helpottaa parien siirtämistä, koska takapyörät kulkevat suoraan käyttäjän työntäessä parien etukaaresta.

Paareissa on portaattomasti kaasujousen avulla säädettävä selkänoja. Lisäominaisuuksia ovat polvienkohotus ja alas käännettävät sivulaidat. Lisäksi Parensi parin korkeutta voidaan säätää ylemmäksi nostettaessa potilas paareille tai paareilta makuuasennossa.

Parensi parien toimintaidea on, että potilas on siirtotilanteissa kasvot menosuuntaan päin käyttäjän työntäessä parien etukaaresta. Paareista on aina pidettävä kiinni siirrettäessä potilasta ajoneuvon ulkopuolella. Älä koskaan siirrä paareja sivuttain, potilaan ollessa paareilla.

Mikäli siirrettäessä potilasta paareille reitillä on yli 1 cm korkuisia kynnyksiä tai muita esteitä, tulee paareja keventää nostamalla ennen esteen ylittämistä. Tällöin toinen käyttäjä keventää takakaaresta nostaen potilaan jalkopäästä ja toinen työntää paareja etukaaresta. Parien on tällöinkin oltava alimmassa asennossaan.




VAROITUS

Potilasvyöt tulee olla tiukasti kiinnitettyinä aina potilaan ollessa paareilla.

Potilaan ollessa paareilla, pidä aina potilasta silmällä. Lisäksi pidä paareista aina kiinni, etenkin lastaus- ja purkuvaiheissa, jotta parit eivät pääse kallistumaan.

Siirtäessäsi paareja, työnnä niitä etukaaresta kiinni pitäen. Parien tulee olla alimmassa asennossa.

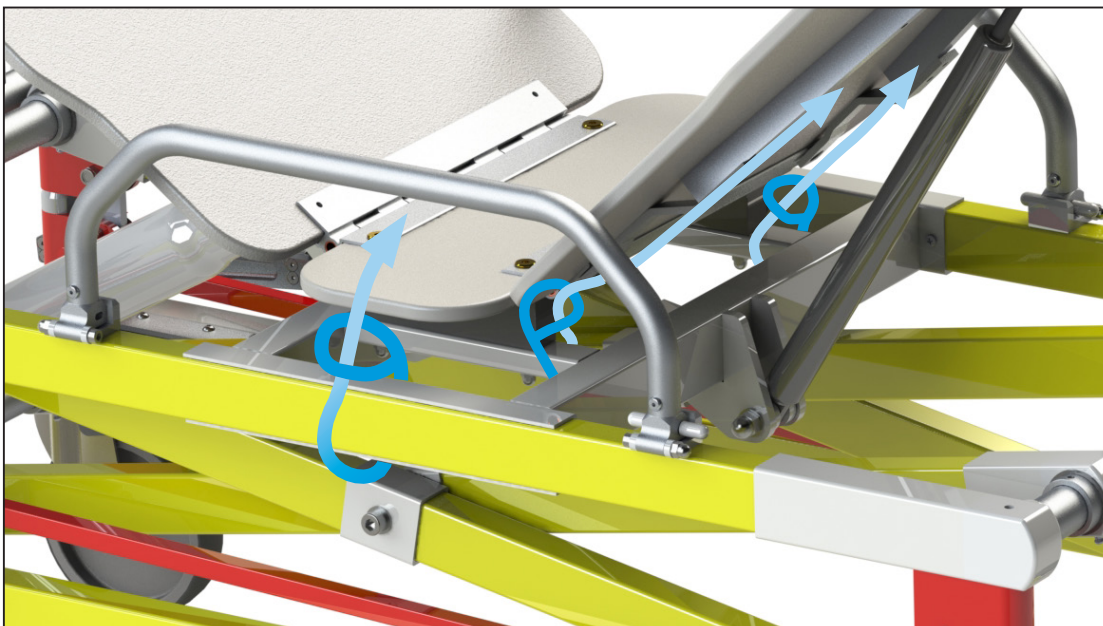

Potilasvöiden
asennus

3.4.2 Paarien poistaminen ajoneuvosta



VAROTOIMI

Käsittele paareja varoen. Mikäli jokin osa tai toiminto ei toimi kevyesti tai suunnitellusti, ota välittömästi yhteys ammattimaiseen huoltohenkilöön tai tarvittaessa valmistajaan.


1. Avaa paarien pyörien jarrut ja vapauta paarit kiinnityksistään.
2. Siirrä paarit varovasti takalaitanostimelle tai rampille. Ole varovainen, ja noudata aina tarkasti nostimen tai rampin valmistajan ohjeita. Pyörien lukitusta tulee käyttää paarien ollessa takalaitanostimella, ja paareista tulee pitää kiinni koko laskeutumisen ajan.
3. Laske takalaitanostin aina täysin ala-asentoon tai varmistu rampin turvallisesta laskeutumisesta.

Työntöramppia käytettäessä, on hyvä olla kaksi ammattimaista käyttäjää siirtämässä paareja ajoneuvoon/ ajoneuvosta. Käyttäjän toimiessa yksin, käyttäjän tulee itse varmistua, että hän pystyy tekemään suunnitellun siirron turvallisesti yksin.

3.4.3 Paarien nostaminen ja laskeminen

Pumpkaa polkimesta paarien takapäässä paarien saksirungon nostamiseksi. Ensimmäisten painallusten tulee olla alas asti painettuja rungon lukituksen avaamiseksi.

Laskeaksesi paareja, paina pientä poljinta kunnes paarit ovat haluamallasi korkeudella.

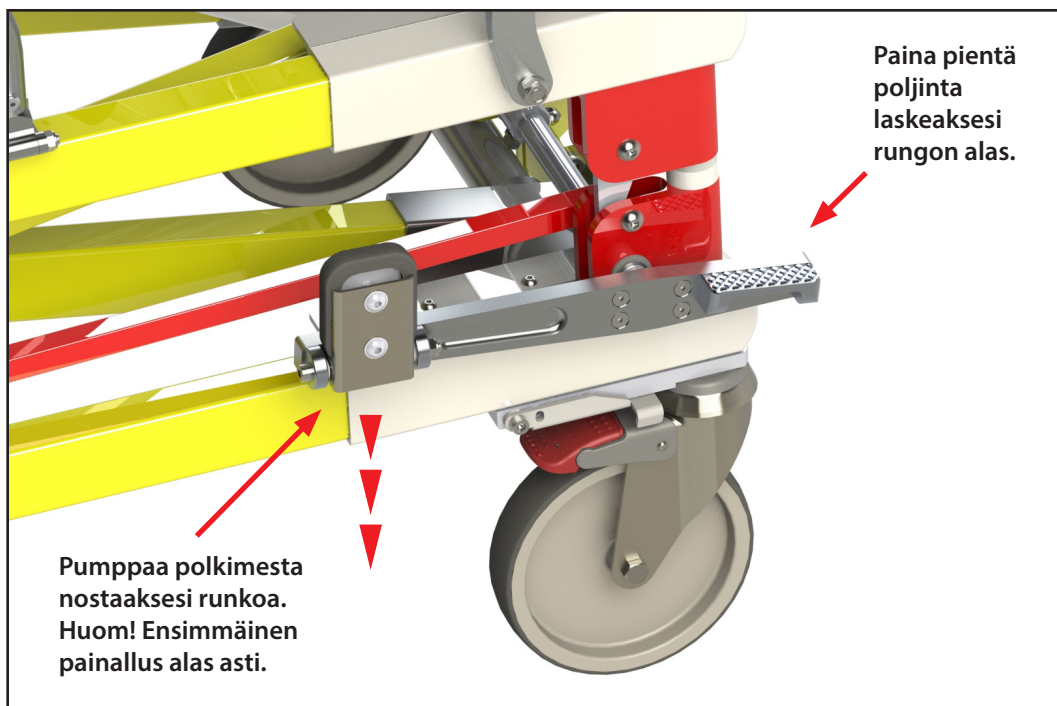


Mikäli parit eivät nouse ylös kahden pohjaan asti painetun painalluksen jälkeen, tarkista että saksirungon lukitukset parin kulmissa ovat auenneet.

Jos lukitukset eivät ole auenneet, lopeta nostopolkimen painaminen. Laske saksirunko takaisin ala-asentoon painamalla polkimen toisesta päästä. Yritä nostoa uudelleen painamalla poljinta pohjaan asti.

Kun parit on nostettu ylimpään asentoonsa ja ne eivät nouse enempää, lopeta polkimen painaminen.

Mikäli et saa paareja nousemaan yrityksistä huolimatta, ota yhteys Pensiin.

Voit tarvittaessa lukita jalkopään pyörät kulkemaan suoraan painamalla suuntalukituksen pyörään. Kun et tarvitse tätä ominaisuutta, nosta suuntalukko takaisin yläasentoonsa. Lukitus kiinnittyy yläasentoon magneetin avulla.

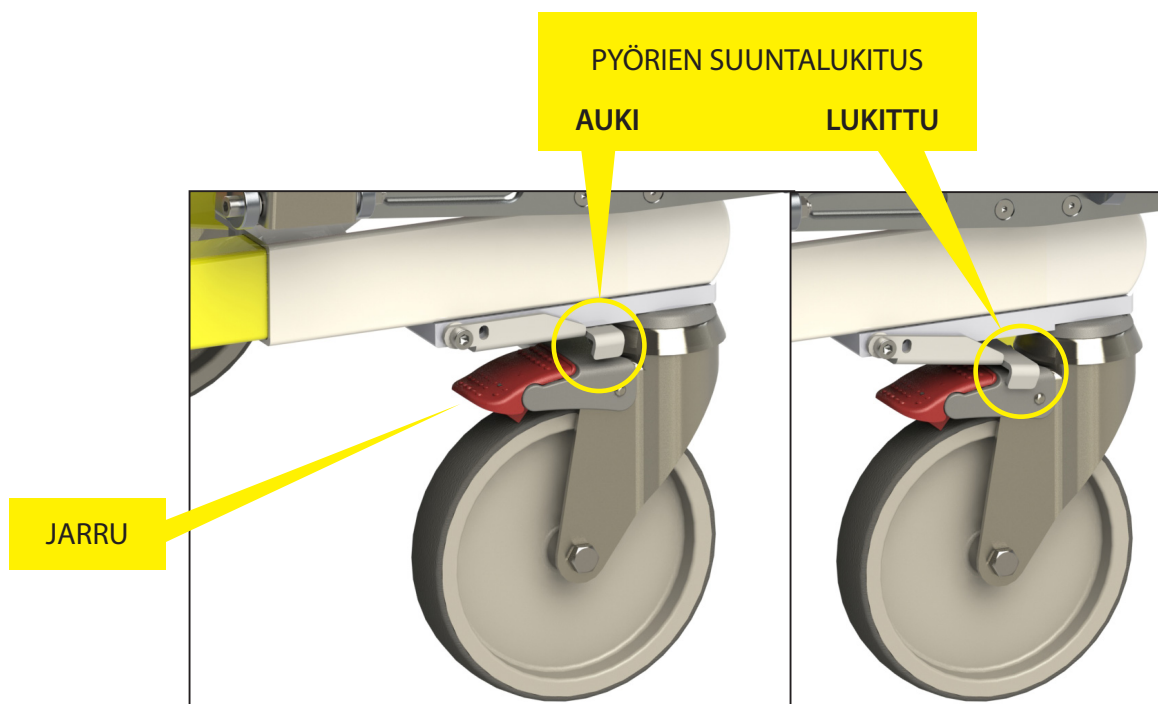

VAROTOIMI

Jos parit nostettu yläasentoon ja potilas kallistuu sivulle päin, parit voivat kaatua. Pidä aina paareista kiinni potilaan ollessa paareilla ajoneuvon ulkopuolella, erityisesti paarien lastaus- ja purkuvaiheissa.




HUOMIO

Varmista, että kädet tai jalat eivät ole paarien kulmien lähellä paareja laskiessa. Tämä voi aiheuttaa loukkaantumisen.

3.4.4 Paarien säätöjen käyttö

Paarien pohjalevystö on kaasujousien avulla portaattomasti säädettävissä potilaan mukavuuden lisäämiseksi.

Yläkehon säätö: tartu tukevalla otteella etukaaresta ja purista punaisesta säätökahvasta. Nyt voit kohottaa tai laskea selkänojaa tarpeen mukaan. Vapauta kahva, jolloin selkänoja lukittuu haluttuun asentoon.

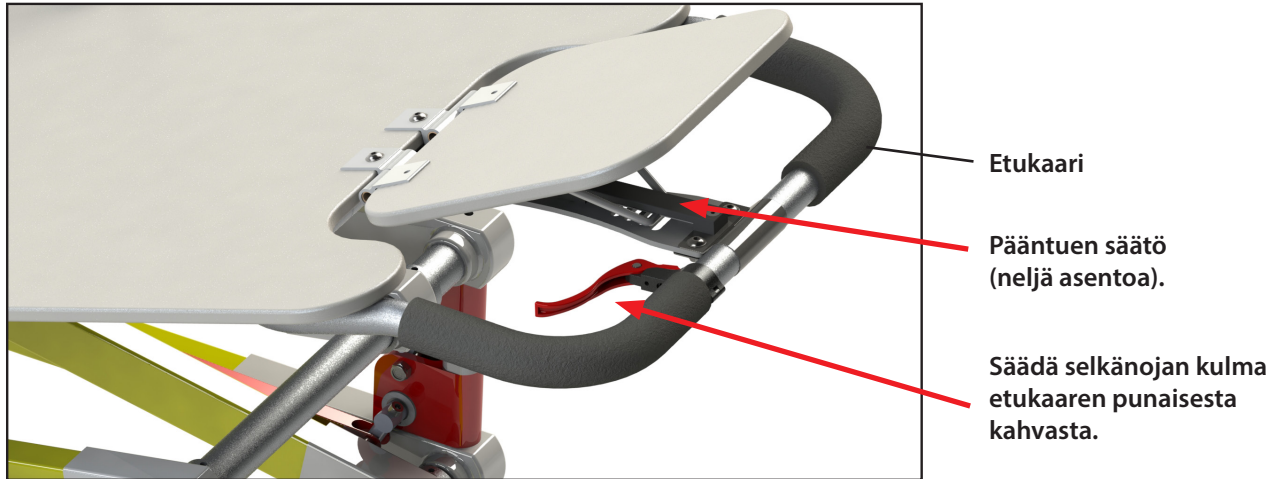



HUOMIO

Kohotetun selkänojan päälle ei saa varata koko kehon painoa. Potilaan tulee istua paarien keskikohtaan.

Paarien pääntuen säätäminen: paarien pääntuessa on neljä asentoa. Nosta päälevy ja valitse oikea asento.

Polvenkohotuksen säätäminen: asetu paarien vierelle ja ota kiinni nostolenkistä (pohjalevystön polvenkohotuksen taitekohdassa). Vapauta kaasujousi punaisesta kahvasta (paarin takakaaressa) ja nosta tai laske polvet haluttuun asentoon. Säätö lukittuu, kun kahva vapautetaan.

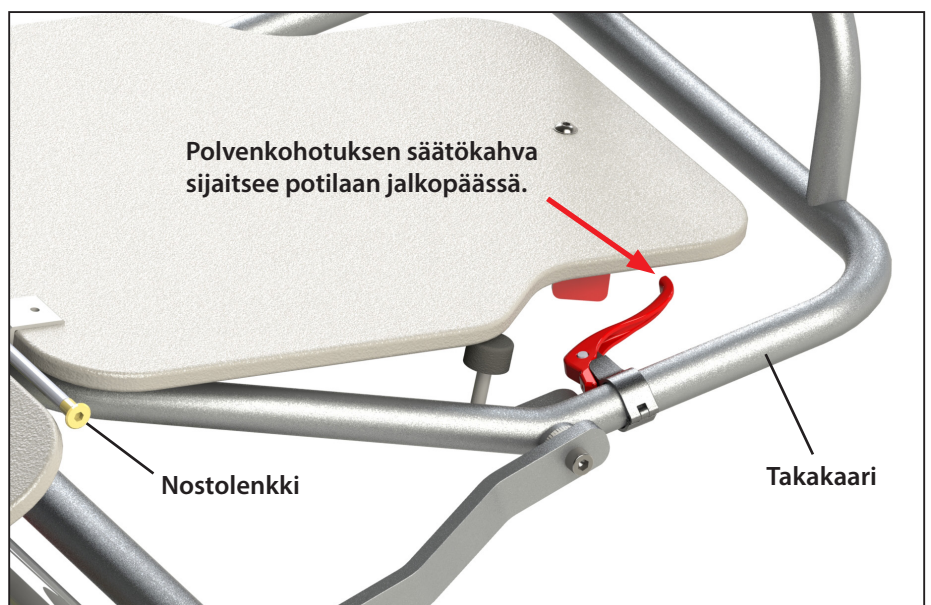

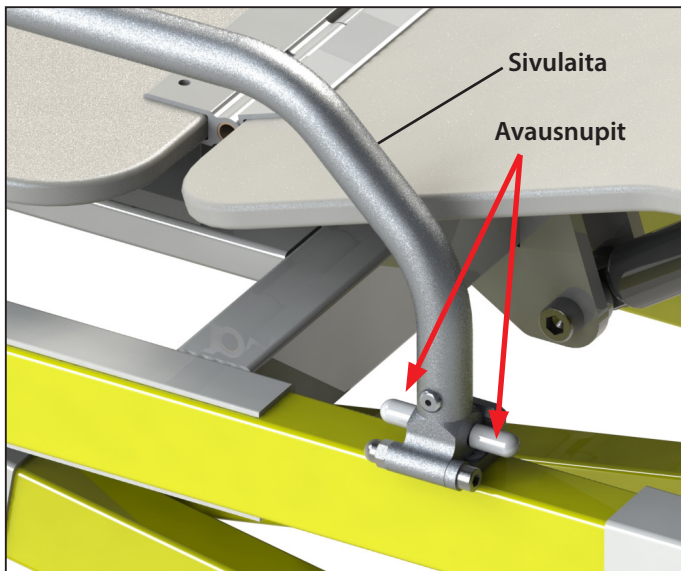

Sivulaidan käyttö: taittaaksesi sivulaidan alas, ota kahdella sormella kiinni sivulaidan valkoisista avausnupeista ja vedä ulospäin lukon avaamiseksi. Toisella kädellä käännä sivulaita alas.

3.4.5 Paarien lastaaminen ja kiinnittäminen ajoneuvoon

Parensi parit on suunniteltu ja testattu käytettäväksi ajoneuvossa yhdessä Pollux Carrier Floor Anchor (valmistaja: Mago Scandinavia Ab, Ruotsi) lattialukituksen kanssa.

Varmista, että parit ovat alimmassa asennossaan jo ennen paarien työntämistä ajoneuvon nostimelle tai rampille.

Pidä paareista kiinni koko ajan lastatessasi paareja ajoneuvoon.

1. Siirrä parit täysin alas lasketulle takalaitanostimelle ja lukitse paarien pyörät ja varmista että parit ovat alimmassa asennossaan
2. Nosta takalaitanostimella parit ajoneuvon tasalle koko ajan varmistaen nostoa. Vapauta paarien jarrut ja siirrä parit ajoneuvoon
3. Kiinnitä parit lattialukitukseen ja varmista, etteivät ne pääse liikkumaan mihinkään suuntaan. Voit halutessasi lukita paarien jarrut.

Kun parit on tukevasti kiinnitetty ajoneuvossa, niiden ei tulisi päästä liikkumaan yhtään. Voit varmistaa lukituksen vetämällä paaria taaksepäin.

Ajoneuvon sisällä ovat käytettävissä kaikki paarien yläosan toiminnot. Toimintoihin kuuluu selkänojan, polvien sekä päätuen asennon säätömahdollisuus. Paarien 4-piste potilasvyöt sekä reisivyö tulee olla aina kiinnitettynä ajoneuvon ollessa liikkeellä.



VAROITUS

Ajoneuvon liikkeessa paarien tulee aina olla alimmassa asennossa ja kiinnitettynä ajoneuvoon tämän ohjeen mukaisesti.

3.4.6 Yli 150 kg painavien potilaiden kuljettaminen

Pensi takaa tämän tuotteen toimivuuden ja kestävyuden tämän ohjeen maksimikantavuuden mukaisesti, edellyttäen että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti huollettuna ja erityistä varovaisuutta noudattaen koulutettujen ammattimaisten käyttäjien toimesta.

Monissa tilanteissa tasaisella alustalla potilaan siirto on yhden ammattimaisen käyttäjän suoritettavissa. Yli 150 kg painavien potilaiden siirto on kuitenkin suoritettava aina vähintään kahden ammattimaisen käyttäjän toimesta. Tällöin kaikki säädöt tulee tehdä tasaisesti ja toisen ammattimaisen käyttäjän avustamana.

Vältä repäiseviä nostoja.

Kuljetettuasi potilasta, jonka paino on lähellä parien sallittua maksimikuormaa, tarkistuta parien toiminnot sekä osat mahdollisten vaurioiden osalta liitteenä olevan huoltolistan mukaan ammattimaisella huoltohenkilöllä.



HUOMIO

Noudata aina varovaisuutta, valvo potilaan istuutumista ja avusta häntä vaikka parien pyörät olisivat lukittuna.

3.4.7 Lapsipotilaat

Noudata lasten potilasvöiden valmistajan ohjeita niiden paareihin kiinnittämiseksi. Lisäksi Pensi suosittelee erillisten lastenvöiden käyttöä alle 45 kg painoisille lapsille tai mikäli parien omat potilasvyöt eivät sovellu kyseiselle potilaalle (lastenvyöt eivät kuulu Pensin valikoimaan).



VAROTOIMI

Alle 18 kg painavien lasten kuljetuksessa tulee käyttää lasten parikuljetukseen suunniteltuja potilasvöitä.

3.4.8 Suojalakanan käyttö

Pensi suosittelee jokaista potilasta varten kertakäyttöisen suojalakanan käyttöä patjan ja potilaan välissä (ei kuulu Pensin tuotevalikoimaan).

Noudata oman käyttäjäorganisaatiosi ohjeita suojalakanan käytöstä.

4. VARAOSAT

Kysyessäsi varaosia tuotteeseen, ilmoita tuotteen sarjanumero (katso tämän ohjeen kappale 2.9 *Sarjanumeron sijainti*).

4.1 Varaosien vaihto

Varaosien vaihto-ohjeet toimitetaan varaosien yhteydessä.




VAROITUS

Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia paareissa. Muiden kuin valmistajan hyväksymien varaosien käyttö voi aiheuttaa vaurioita ja vaaratilanteita. Takuu ei korvaa vaurioita muiden kuin valmistajan ilmoittamien varaosien käytöstä.

4.2 Varaosaluettelo

Kuva	Osanumero	Nimike	Numero kuvassa
	0240400	Lukittuva kaasujousi takapäätä	30
	0015100	Pyörä lukittu 150mm	31
	0240100	Lukittuva kaasujousi etupäätä	32
	0230101	Vapautinkahva vasen	33
	0230102	Vapautinkahva oikea	34
	321N370	Niskalevyn säätökotelo	35
	2312100	Etukaaren tukilevy	36
	321N450	Yläkehon säädön vaijeri (+nipat)	37
	331N260	Polvenkohotuksen vaijeri (+nipat)	38
	331N271	Suuntalukko vasen	39

Kuva	Osanumero	Nimike	Numero kuvassa
	331N271	Suuntalukko oikea	40
	00-36-00	Patja	41
	32-30-02	4-pistevyöt	42
	32-30-00	Reisivyö	43

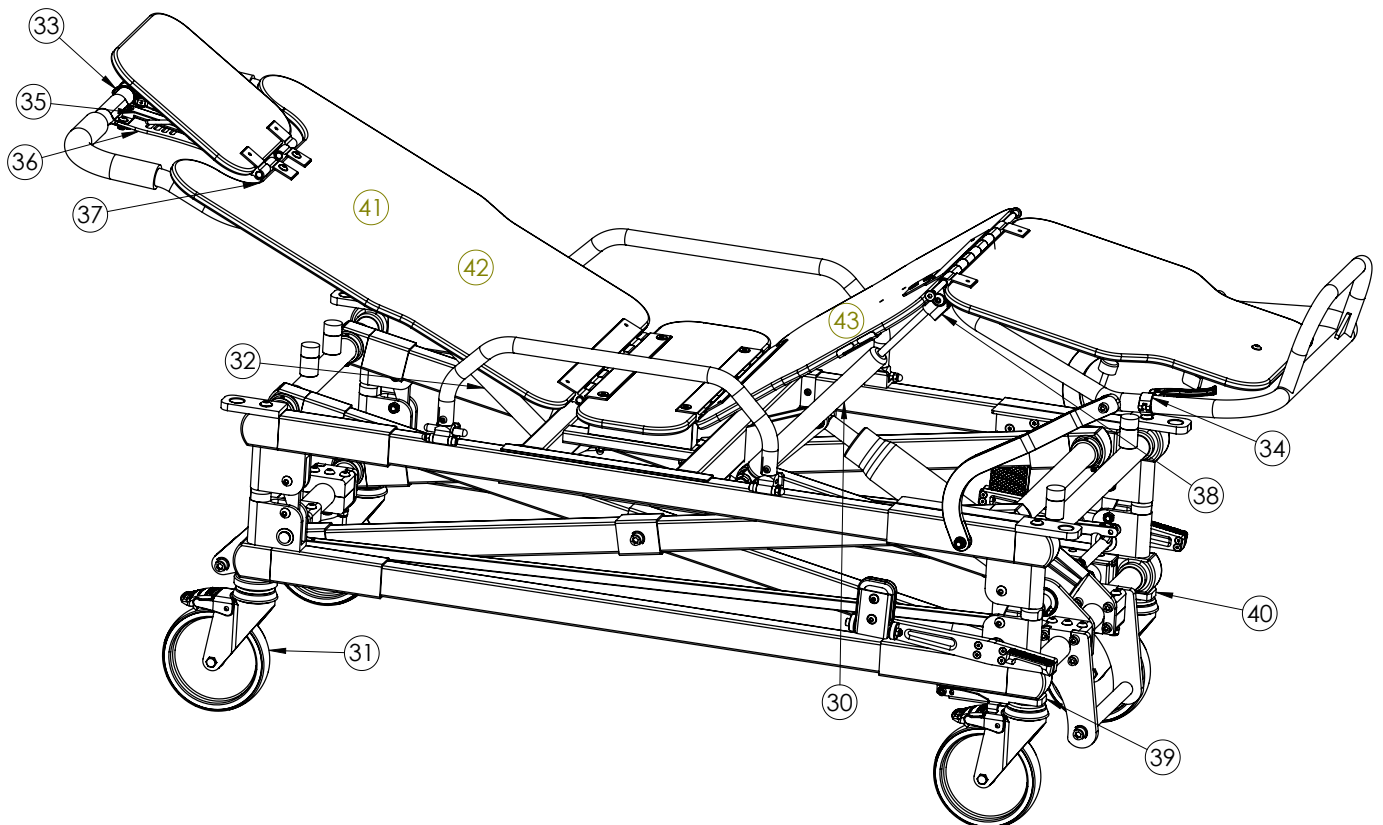

5. PUHDISTUS

Puhdista tai tarvittaessa pese sekä desinfioi Parensi parit jokaisen potilaan jälkeen. Noudata puhdistukses-
sa, pesussa ja desinfioinnissa organisaatiosi ohjeita.

Parit saa puhdistaa ainoastaan ammattimainen käyttäjä tai huoltohenkilö.



VAROTOIMI

Desinfioi jokaisen potilaan jälkeen kaikki parien osat joihin potilas tai käyttäjä on koskenut.


Käytä suojalaseja, hengityssuojainta ja suojakäsineitä aina puhdistaessasi ja pestessäsi paareja.

Älä käytä ultraääntä tai höyrypuhdistusta parien puhdistukseen.

Painepesurin käyttöä tulee välttää. Jos sen käyttö on välttämätöntä, pesurin suutin on pidettävä vähintään 1,5 metrin etäisyydeltä paareista.

Kaikissa tapauksissa veden lämpötila on oltava alle +50 °C.

Puhdista ja voitele parien pesun jälkeen voitelua vaativat pääkomponentit (katso kuva alla).

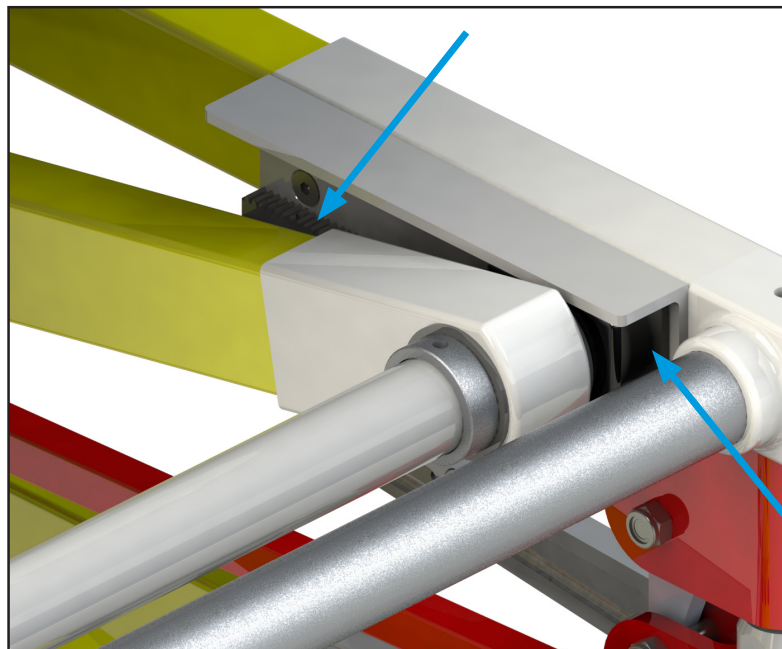

VAROTOIMI

Älä istu tai seiso parien päällä. Parit voivat rikkoontua.

Hygieniapatja

Patjan päällyskangas voidaan desinfoida käyttäen joko klooriamiini- tai alkoholipohjaista desinfiointiainetta, kyseisen desinfiointiaineen valmistajan ohjeen mukaisesti laimennettuna ja käytettynä.

Huuhtelee tarvittaessa ja kuivaa huolellisesti desinfiointiaineen valmistajan ohjeen mukaisesti.

Patjan valmistaja ei vastaa pesemisen tai desinfioinnin aiheuttamista vahingoista patjan sisäosalle tai päällyskankaalle.

Anna patjan pinnan kuivua desinfioinnin jälkeen ennen uudelleen käyttöönottoa.

Mikäli patjan sisäosaan on päässyt nesteitä tai muuta likaa ja se on likaantunut, on koko patja vaihdettava välittömästi uuteen. Patjan sisäosaa ei ole tarkoitettu irrotettavaksi eikä pestäväksi.



VAROTOIMI

Varmistuaksesi patjan puhtaudesta, vaihda rikkiäinen tai sisäosasta likaantunut patja välittömästi uuteen tai vaihda vanha patja uuteen vähintään 4 vuoden välein.

6. KUNNOSSAPITO JA HUOLTO


Parensi paareja saavat huoltaa ja korjata tämän ohjeen liitteen 2. huoltolistan mukaisesti ainoastaan näihin tehtäviin koulutetut henkilöt:

- Ammattimainen hoito- tai kuljetushenkilöstö: päivittäinen puhdistus, desinfiointi ja pääkomponenttien voitelu ohjeen mukaan
- Ammattimainen huoltohenkilöstö: kuukausittainen/vuosittainen tarkastus, puhdistus ja huolto, niiden varaosien vaihto joihin koulutettu.

Tarkemmat ohjeet on kuvattu alla *Säännölliset tarkastukset ja huollot* -kohdan taulukoissa.

Huolto tulee dokumentoida käyttäjäorganisaation toimesta. Liitteen 2. huoltolista on tarkoitettu vuosihuoltoon. Käyttäjäorganisaation on säilytettävä kaikki vuosihuoltodokumentit, sekä annettava ne parien mukana jos ne myydään.

Tuotteessa on uutena seuraavan huollon ajankohdan osoittava tarra. Käyttäjäorganisaation tulee huolehtia vastaavan merkinnän lisäämisestä tuotteeseen aina vuosittaisen huollon ja tarkastuksen yhteydessä.

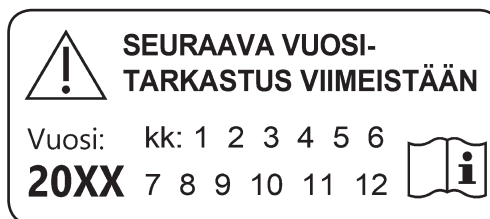

VAROITUS

Huoltamattoman tai tarkastamattoman tuotteen käyttö on kielletty.

Säännölliset tarkastukset ja huollot



VAROTOIMI

Huoltohenkilöstön pitää suorittaa huoltotoimenpiteet suojakäsineet käsissä.



VAROITUS

Ainoastaan säännöllinen huolto mahdollistaa tuotteen turvallisen käytön paareihin merkittyyn maksimikäyttöikänsä saakka.

Päivittäin

Paarien osa	Toimenpide
Paarien toiminnot	Ammattimainen käyttäjä kokeilee paarien toiminnot päivittäin sekä silmämääräisesti tarkastaa paarien osien kunnon ja kiinnityksen. Tarvittaessa pääkomponenttien puhdistus ja voitelu. Mikäli ammattimainen käyttäjä havaitsee osien kulumista tai parit eivät toimi suunnitellusti, tulee käyttäjän asettaa parit käyttökieltoon ja toimittaa ne ammattimaisen huoltohenkilön huollettavaksi.

Kerran kuukaudessa

Paarien osa	Toimenpide
Paarien toimintojen perusteellinen kokeilu, tarkastus ja puhdistus.	Ammattimainen käyttäjä tai huoltohenkilö kokeilee ja tarkastaa perusteellisesti paarien kaikki toiminnot sekä varmistaa kaikkien osien kunnon ja kiinnityksen. Tarkista kaikki ruuviliitokset, erityisesti kaasujousien ja pyörien kiinnitykset sekä mahdollisesti kuluneet tai rikkoutuneet osat (esim. potilasvyöt, patja). Mikäli ammattimainen käyttäjä havaitsee osien kulumista tai parit eivät toimi suunnitellusti, tulee käyttäjän asettaa parit käyttökieltoon ja toimittaa ne ammattimaisen huoltohenkilön huollettavaksi. Kuukausittainen tarkastus/huolto on dokumentoitava ja dokumentit säilytettävä käyttäjäorganisaatiossa.

Kerran vuodessa

Paarien osa	Toimenpide
Liitteen 2 mukainen huoltolista	Ammattimainen huoltohenkilö suorittaa perusteellisen vuositarkastuksen ja huollon tämän ohjeen liitteen 2 huoltolistan mukaan. Vuositarkastus ja huolto on dokumentoitava ja dokumentit säilytettävä käyttäjäorganisaatiossa. Vuositarkastuksen jälkeen ammattimaisen huoltohenkilön on lisättävä seuraavasta vuositarkastuksesta muistuttava merkintä paareihin, jotta ammattimainen käyttäjä voi varmistua, että parit ovat asianmukaisesti ajallaan tarkastettu ja huollettu. Seuraava vuositarkastus, josta merkintä paareissa kertoo, tulee suorittaa viimeistään tarkastusta vastaavana kuukautena seuraavana vuonna.

7. KÄYTÖSTÄ POISTO JA HÄVITTÄMINEN

Käytöstä poisto

Poista Parensi parit käytöstä, kun niihin merkitty viimeinen käyttöpäivä on saavutettu.

Poista Parensi parit käytöstä myös jos ne ovat olleet liikenneonnettomuudessa.

Paarien sen hetkinen omistaja vastaa käytöstä poistosta.

Tee käytöstä poisto esimerkiksi poistamalla paarista tyyppikilpi ja merkitsemällä parit käytöstä poistetuksi.

Älä myy käytöstä poistettuja Parensi paareja eteenpäin.

Ota tarvittaessa yhteys Pensiin.

Hävittäminen

Parensi parien hävittämisestä vastaa niiden sen hetkinen omistaja.

Voit toimittaa Parensi parit Pensille kierrätettäväksi.

Jos haluat hävittää laitteen omatoimisesti, noudata paikallisia jätteenkäsittelymääräyksiä ja ohjeita. Halutesasi voit irrottaa metalli- ja muoviosia kierrätykseen.

8. TAKUUEHDOT

1. Näitä takuuehtoja sovelletaan kaikkiin Pensi Rescue Oy:n myymiin Pensi -tuotteisiin sekä niiden lisävarusteisiin, ellei keskinäisissä sopimuksissa ole toisin sovittu.

2. Tavarán vastaanottaja on velvollinen tarkastamaan tavarán huolellisesti heti vastaanottaessaan toimituksen ja ilmoittamaan mahdollisista virheistä myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus tulee tehdä kahden (2) viikon kuluessa siitä kun ostaja havaitsi virheen.

3. Takuu-aika on kaksi (2) vuotta. Takuu koskee myyjän toimittamissa tuotteissa mahdollisesti ilmeneviä valmistus- asennus- tai materiaalivikoja Myyjä voi harkintansa mukaan korjata ja/ tai hyvittää virheelliseksi toteamansa tuotteen tai sen osan Myyjä vastaa ainoastaan ostajan tuotteesta maksamaan kauppahintaan saakka vahingosta, joiden näytetään johtuvan tuotteesta olevasta virheestä taikka myyjän sopimusrikkomuksesta. Takuu ei koske normaalia ajan mittaan tapahtuvaa kulumista.

4. Tuotteisiin ei saa tehdä takuu-aikana muutoksia joita valmistaja ei ole etukäteen hyväksynyt, eikä tuotteessa saa takuu-aikana käyttää muita kuin valmistajan hyväksymiä lisävarusteita, tarvikkeita tai varaosia.

5. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheellisestä käytöstä, käytöstä vastoin tuotteen käsittely- tai käyttöohjeita, virheellisestä varastoinnista, puutteellisesta huollosta, ilman valmistajan lupaa tehdyistä muutoksista, muiden kuin valmistajan ilmoittamien varaosien käytöstä, liikenne- onnettomuudesta tai muista tarkastusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä. Takuu ei myöskään korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen ylisuuresta kuormittamisesta. Takuun perusteella ei korvata seison- tapäiviä, muita välillisiä kuluja ja vahinkoja, kulutusosia (esim. parien pyörä), rahtikustannuksia, päivärahoja ja matkakustannuksia.

6. Mikäli takuu-aikana ilmennyt vika on korjautettu ulkopuolisella, valmistaja korvaa aiheutuneet kustannukset vain siinä tapauksessa, että tästä on sovittu etukäteen valmistajan kanssa.

7. Takuukorjaus suoritetaan, kun virheellinen tuote tai sen vaurioitunut osa on toimitettu tehtaallemme tarkistettavaksi, tai se on edustajamme toimesta arvioitu ja vaurio on todettu takuukorjauksen piiriin kuuluvaksi. Palautuksen liitteenä tulee olla kirjallinen selvitys vian laadusta ja synnystä sekä selvitys siitä, milloin tavara on toimitettu vastaanottajalle.

8. Takuuhuollon tai -korjauksen edellytyksenä on, että reklamaation yhteydessä esitetään tosite ostopäivästä.

9. Palautusehdot

- Palautuksesta on aina sovittava myyjän kanssa, sopimatta palautettua tavaraa ei hyvitetä
- Tavara on palautettava kohtuullisen ajan kuluessa, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa toimituspäivästä tai virheen ilmenemisestä.
- Tavara on palautettava valmistajalle Sastamalaan.
- Palautettava tavara tulee olla siinä kunnossa kun myyjä on sen toimittanut, jotta tavara voidaan ottaa vastaan ja hyvittää.
- Palautuksen yhteydessä on toimitettava tosite ostopäivästä.
- Palautusrahti on maksettava lähetysasemalla.

PENSI Perehdyttämislista Parensi parien käyttöön

Käyttöönottokoulutus

Koulutuksen saajan ja organisaation nimi : _____

Koulutuksen antajan nimi: _____

1. Yleistä/Huomioitava ennen Parensi parien käyttöönottoa:

1. Käyttäjällä on koulutus Parensi parien käyttöön ennen potilastilanteissa toimimista.
2. Tarkista Parensi parien tyyppikilven sijainti, tiedot ja kunto.
3. Paaria 1. kertaa käyttöönotettaessa, varmista että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksessa.
4. Huoltamattoman/tarkastamattoman laitteen käyttö on kielletty. Tarkista huoltotarran sijainti.
5. Viat ja puutteet on korjattava ennen Parensi parien käyttöä. Jos havaitset paareissa vian, aseta se käyttökieltoon ja ota yhteyttä yksikkösi koulutettuun huoltohenkilöön.
6. Älä ylikuormita Parensi paareja (katso max. lastauskapasiteetti käyttöohjeesta).
7. Käytä Parensi paareja vain niiden suunniteltuun käyttötarkoitukseen (ja katso vasta-aiheet ohjeista).
8. Säilytä käyttöohje niin että voit aina tarvittaessa tarkastaa siitä toimintaohjeita.

2. Ergonomia:

1. Harjoittele Parensi parin käyttöä etukäteen, jotta osaat toimia ergonomisesti oikein.
2. Yksin Parensi paaria käytettäessä käyttäjän tulee itse varmistua, että pystyy tekemään suunnitellut toiminnot. Muussa tapauksessa tulee käyttää vähintään kahta käyttäjää.
3. Toimi painavien (yli 150 kg) potilaiden kanssa aina kahden käyttäjän toimesta.

3. Parensi parien toiminnot:

1. Parensi parien lastaus ajoneuvoon ja uloslataus ajoneuvosta sekä kiinnitys ajoneuvoon.
2. Parensi parien käsitteleminen (mm potilaan kuljetussuunta).
3. Parensi parien nostaminen ja laskeminen.
4. Potilaan siirtäminen Parensi paareille.
5. Parensi parien yleiset toiminnot ja säädöt.
6. Pyörien suuntalukituksen käyttö.
7. Parensi parin lukkiutuminen ala-asentoon.
8. Painavien potilaiden (yli 150 kg) kuljettaminen.

4. Varotoimenpiteet paareja käsiteltäessä ja paareilla olevan potilaan valvonta:

1. Älä jätä potilasta yksin paareille. Pidä aina paareista kiinni.
2. Varmista potilasvöiden oikea ja tiukka kiinnitys aina potilaan ollessa paareilla.
3. Varmista lukitukset ennen ajoneuvon liikkeellelähtöä.
4. Pidä aina paareista kiinni ajoneuvoon lastauksen ja uloslatauksen aikana.
5. Tue paareja aina etukaaresta kiinni pitäen (esim. levottomat potilaat, ennalta arvaamaton käytös).

5. Parien puhdistus ja huolto:

1. Puhdistaminen ja desinfiointi (aikataulu, suojarusteet, puhdistusvälineet, puhdistusaineet).
2. Huolto (säännölliset tarkastukset, voitelu, suojarusteet, huoltomerkintä, huollon dokumentointi).

6. Lisävarusteet: 1. Infuusionesteteline ei käytössä 2. Takavetokahva ei käytössä

Olen saanut riittävän koulutuksen tuotteen käyttöön:

Pvm.: ____ / ____ 20____, Koulutuksen saajan allekirjoitus: _____

Pvm. : ____ / ____ 20____, Koulutuksen antajan allekirjoitus: _____

Asiakkaan nimi	Sarjanumero
Sijaintipaikka / yksikkötunnus	Seuraava huolto
Yhteyshenkilön nimi	Puhelin no.

Tarkastusmerkinnät:	ok	ei ok	Tarkastusmerkinnät:	ok	ei ok
1. Runko: muodonmuutokset ja liitokset			13. Sivulaidat: lukitus ja kiinnitys		
2. Ruuvikiinnitykset: silmämääräinen tarkistus			14. Suuntalukot		
3. Pohjalevy: kunto yleisesti ml. Saranat			15. Pyörien kunto, kiinnitys ja toiminta		
4. Punaiset heijastintarrat			16. Pyörien jarrujen toiminta		
5. Korkeudensäädön toiminta			17. Patjan kunnon tarkastus		
6. Lukituskoukkujen toiminta (ohjaintapit ei hankaa, nylon holkit ok)			18. Puhdistus		
7. Kaarilatat: Kiinnitysruuvit/mutterit			19. Voitelu		
8. Polkimien toiminta			20. Vöiden ja vyön lukkojen toiminta		
9. Kaasujousien (2 kpl) toiminta: yläkeho, polvenkohotus			21. Tyyppikilpi: kaikki tiedot luettavissa		
10. Polvien kohotuksen toiminta					
11. Säärilevy: Punaisen kohotusraudat toiminta					
12. Niskalevyn säädön toiminta					

Tarkastuksessa todetut viat ja puutteet korjattu, kohta no. :

Vialliset osat vaihdettu, kohta no.:

Seuraavat kohdat eivät sisälly/sovellu tähän laitteeseen:

Lisätiedot :

Laite on huollon jälkeen käyttökunnossa

Laitteen käyttö ei ole turvallista ennen kuin edellämainitut osat on vaihdettu (ks. Lisätiedot)

Tarkastajan allekirjoitus	Päivämäärä
Nimenselvennös	

PENSI

Made in Finland



PENSI

*Pensi Rescue Oy
Ahertajankatu 5
38250 Sastamala*

*Puh. 03 512 5600
E-mail: pensi@pensi.fi
www.pensi.fi*