


PENSI

Pensi kiinnityskiskosto

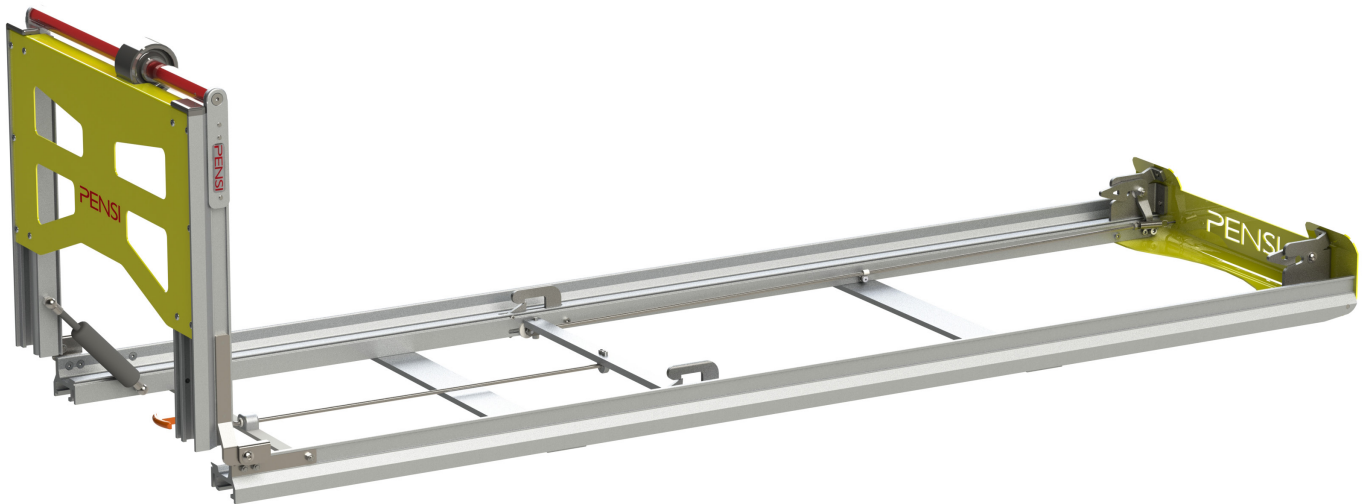

Made in Finland 

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE

**Ennen laitteen käyttöä lue ohjeet
ja pidä ne saatavilla myöhemmän tarpeen varalle.**

Ohjeversio 3.0
21-05-2021

CE












SISÄLLYSLUETTELO

SYMBOLIT	4
1. YLEISTÄ	5
1.1 Laitteen nimi	5
1.2 Laitteen valmistajan nimi ja yhteystiedot	5
1.3 Vastuuvapauslauseke	6
1.4 Vaatimustenmukaisuus	6
1.5 Käyttö- ja huolto-ohjeen saatavuus	6
2. TUOTETIEDOT	8
2.1 Suunniteltu käyttötarkoitus	8
2.2 Suunnitellut käyttäjät	8
2.3 Vasta-aiheet	9
2.4 Tekniset tiedot	9
2.5 Kuljetus ja varastointi	10
2.6 Vakiovarusteet	10
2.7 Lisävarusteet	10
2.8 Kliiniset hyödyt	10
2.9 Sarjanumeron sijainti	10
3. LAITTEEN KÄYTTÖ	11
3.1 Ennen käyttöä	12
3.2 Ergonomia	12
3.3 Käyttö- ja huoltokoulutus	12
3.4 Kiinnityskiskoston käyttö ja toiminnot	13
4. VARAOSAT	14
4.1 Varaosaluettelo	14
5. PUHDISTUS	15
6. KUNNOSSAPITO JA HUOLTO	15

7.	KÄYTÖSTÄ POISTO JA HÄVITTÄMINEN	17
8.	TAKUUEHDOT	18
LIITE	HUOLTOLISTA	19

SYMBOLIT

Alla kuvataan symbolit, joita käytetään tässä käyttö- ja huolto-ohjeessa, laitteen tyyppikilvessä tai muissa merkinnöissä.

	Huomio. Antaa lisätietoja ja selventää ohjeita.
	Varoitus. Mahdollisesti vaarallinen tilanne joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan, jos tilannetta ei vältetä erityistoimilla.
	Varoitus. Mahdollisesti vaarallinen tilanne joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen tai laitteen vaurioitumiseen, jos tilannetta ei vältetä erityistoimilla.
	Varoitus (tyyppikilvessä). Käyttäjän on katsottava käyttöohjeista tärkeitä tiedot, kuten varoitukset ja varoitimet.
	Lääkinnällinen laite
	Valmistaja
	Katso käyttöohje
	Viimeinen käyttöpäivä VVVV-KK
	Tuotenumero
	Sarjanumero
	CE-merkki

1. YLEISTÄ

Nämä ohjeet auttavat sinua käyttämään ja huoltamaan Pensi kiinnityskiskostoa sekä käyttöään päättymisen jälkeen poistamaan se käytöstä asianmukaisesti.



VAROITUS

Lue ohjeet ennen kuin käytät tai huollat laitetta.

Kiinnityskiskoston väärä käyttö voi aiheuttaa vahinkoja potilaalle, muille käyttäjille tai laitteelle.

Tässä ohjeessa ei anneta ohjeita potilaan lääketieteellisestä hoidosta. Käyttäjällä tulee olla koulutus ja/tai tieto potilaiden lääketieteellisestä hoidosta.

Tässä ohjeessa ei ole mahdollista kuvata kaikkia tilanteita joihin käyttäjä voi potilasta tieliikenneajoneuvoon sisään tai ulos lastatessaan joutua. Jos ajoneuvo on vinolla alustalla, tulee paareja ajoneuvoon lastatessa käyttää erityistä huomiota sekä tarvittaessa useampia ammattikäyttäjiä.

1.1 Laitteen nimi

Pensi kiinnityskiskosto

1.2 Laitteen valmistajan nimi ja yhteystiedot

Nimi: Pensi Rescue Oy

Osoite: Ahertajankatu 5, 38250 Sastamala

Puhelin: +358 (0)3 512 5600

Sähköposti: pensi@pensi.fi

Ota yhteys valmistajaan jos tarvitset apua ohjeiden ymmärtämisessä, et löydä etsimiäsi tietoja, haluat tilata varaosia tai huollon.

Ottaessasi yhteyttä valmistajaan, ilmoita Pensi kiinnityskiskoston sarjanumero. Löydät sarjanumeron kappaleen *2.9 Sarjanumeron sijainti* avulla.

1.3 Vastuuvapauslauseke

Käyttäjä ja/tai käyttäjäorganisaatio vastaa laitteen turvallisesta ja oikeasta käytöstä. Ennen Pensi kiinnityskiskoston käytön aloittamista, käyttäjäorganisaation on huolehdittava että kaikilla käyttäjillä on koulutus tuotteen turvalliseen ja oikeaan käyttöön. Valmistajan vastuu raukeaa kokonaisuudessaan seuraavista syistä:

- Kiinnityskiskostoa on käytetty tämän käyttö- ja huolto-ohjeen vastaisesti,
- Kiinnityskiskostoon on tehty rakenteellisia muutoksia ilman valmistajan kirjallista lupaa tai ohjetta,
- Kiinnityskiskostossa on käytetty muita kuin valmistajan toimittamia varaosia,
- Kiinnityskiskostoon on kiinnitetty muu kuin Pensi 2000MA monitoimipaarit,
- Kiinnityskiskoston säännöllinen huolto tai käyttäjien käyttökoulutus on laiminlyöty,
- Kiinnityskiskostoa ei ole toimitettu tarkastukseen/huoltoon Pensille tai Pensin valtuuttamalle edustajalle, mikäli ammattimainen huoltohenkilö ei pysty tarkastamaan/huoltamaan kiinnityskiskostoa,
- Kiinnityskiskostoa on ylikuormitettu, tai
- Kiinnityskiskostoa on käytetty maksimikäyttöiän jälkeen.

Käyttäjä ja/tai käyttäjäorganisaatio vastaa yksinään edellä mainittuihin syihin sisältyvistä riskeistä tai vahingoista. Käyttöohjeiden huomiointi ja noudattaminen ovat osana nimettyä käyttötarkoitusta sekä takuuehdoja. Tämä käyttö- ja huolto-ohje on pidettävä lukemisen jälkeenkin saatavilla. Mikäli kiinnityskiskosto myydään eteenpäin, vastaa sen hetkinen myyjä siitä, että myös käyttö- ja huolto-ohje sekä kiinnityskiskoston vuosittainen tarkastusdokumentaatio toimitetaan sen mukana.

1.4 Vaatimustenmukaisuus

Pensi kiinnityskiskosto täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen MDR (EU) 2017/745 vaatimukset ja se on luokan I CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Pensi kiinnityskiskosto noudattaa standardia SFS-EN 1865 soveltuvin osin.

Mikäli kiinnityskiskostoon on tehty rakenteellisia muutoksia ilman valmistajan kirjallista lupaa tai ohjetta, edellä mainitut vaatimukset eivät enää täyty.

1.5 Käyttö- ja huolto-ohjeen saatavuus

Tämä käyttö- ja huolto-ohje on saatavilla Pensin www-sivuilta <http://www.pensi.fi>
Pyydä latausohjeet Pensiltä.



HUOMIO

Käyttäjälle siirtyvät valmistajan vastuut, jos hän

- asettaa laitteen saataville markkinoilla omalla nimellään, rekisteröidyllä toiminimellään tai rekisteröidyllä tavaramerkillään, lukuun ottamatta tapauksia joissa valmistajan kanssa on tehty sopimus asiasta;
- muuttaa jo markkinoille saatetun tai käyttöön otetun laitteen käyttötarkoituksen; tai
- muuttaa jo markkinoille saatetun tai käyttöön otetun laitteen siten, että muutos saattaa vaikuttaa siihen, onko laite sovellettavien vaatimusten mukainen.

Käyttäjän ja/tai potilaan pitää ilmoittaa kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet sekä valmistajalle että sen EU-jäsenmaan valvovalle viranomaiselle jossa käyttäjä ja/tai potilas ovat.

2. TUOTETIEDOT

2.1 Suunniteltu käyttötarkoitus

Pensi kiinnityskiskosto on tarkoitettu helpottamaan ammattimaista hoito- tai kuljetushenkilöstöä lastaamaan Pensi 2000MA monitoimipaareilla oleva potilas turvallisesti tieliikenneajoneuvosta sisään ja ulos. Lisäksi Pensi kiinnityskiskosto lukitsee Pensi 2000MA monitoimipaarit tieliikenneajoneuvoon, jotta voidaan varmistaa potilaan ja ammattimaisen hoito- tai kuljetushenkilöstön turvallisuus kuljetuksen aikana.



VAROITUS

Käytä Pensi kiinnityskiskostoa vain siihen tarkoitukseen mitä tässä ohjeessa on kuvattu.

Kiinnityskiskoston väärä käyttö voi aiheuttaa vahinkoja potilaalle, käyttäjälle tai laitteelle.

2.2 Suunnitellut käyttäjät

Pensi kiinnityskiskoston suunnitellut käyttäjät ovat ammattimainen hoito-, kuljetus- ja huoltohenkilöstö sekä potilaat.

Suunnitellut pääkäyttäjät ovat ammattimainen hoito- tai kuljetushenkilöstö, jotka ammatikseen hoitavat ja/ tai kuljettavat parikuljetusta tarvitsevia potilaita. Heillä on lääketieteellinen koulutus tai tietotaito vamman tai toimintarajoitteen omaavien henkilöiden kuljettamiseen ambulanssissa tai muussa parikuljetukseen suunnitellussa ja hyväksytyssä ajoneuvossa.

Suunniteltuja käyttäjiä ovat myös ammattimainen huoltohenkilöstö, jolla on riittävät tekniset tiedot ja taidot vastaavien tuotteiden huollosta.

Potilaalla tarkoitetaan henkilöä jolla on vamma tai toimintarajoite jonka lieventämisen tai kompensoinnin takia tarvitaan parikuljetusta. Potilas itse ei koskaan käytä laitteen toimintoja, vaan hän on aina loppukäyttäjä johon siirto tai kuljetus kohdistuu.



VAROITUS

Pensi kiinnityskiskostoa saavat käyttää ainoastaan näihin tehtäviin koulutetut ammattimaiset käyttäjät.

Käyttökoulutusohjeet löydät kappaleesta 3.3 *Käyttö- ja huoltokoulutus*.



VAROTOIMI

Käyttökoulutus tulee dokumentoida käyttäjäorganisaation toimesta ja koulutusdokumentti tulee säilyttää käyttäjäorganisaatiolla todisteena käyttäjien kouluttamisesta.

2.3 Vasta-aiheet

Laitetta ei ole tarkoitettu:



- käyttöön tieliikenneajoneuvon ulkopuolella
- kuluttaja-/yksityiskäyttöön
- käytettäväksi ilma-aluksissa tai helikoptereissa
- käytettäväksi sotilaskäyttöön tarkoitetuissa ajoneuvoissa.

2.4 Tekniset tiedot

Kokonaispituus	188 cm (233 cm ramppi suorana)
Ulkoleveys	58 cm, saranoiden kohdalla 62 cm
Paino	24 kg
Max. lastauskapasiteetti	250 kg (= Pensi 2000MA monitoimipaarit + potilas)
Tuotteen maksimikäyttöikä	8 vuotta*

*Edellyttäen että tuotetta on käytetty normaaliolosuhteissa, huollettu ja huolto dokumentoitu ohjeiden mukaan ja että se edelleen täyttää käyttöhetkellä voimassaolevat vaatimukset (esim. standardit).

Seuraava kuva havainnollistaa joitakin Pensi kiinnityskiskoston mittoja.

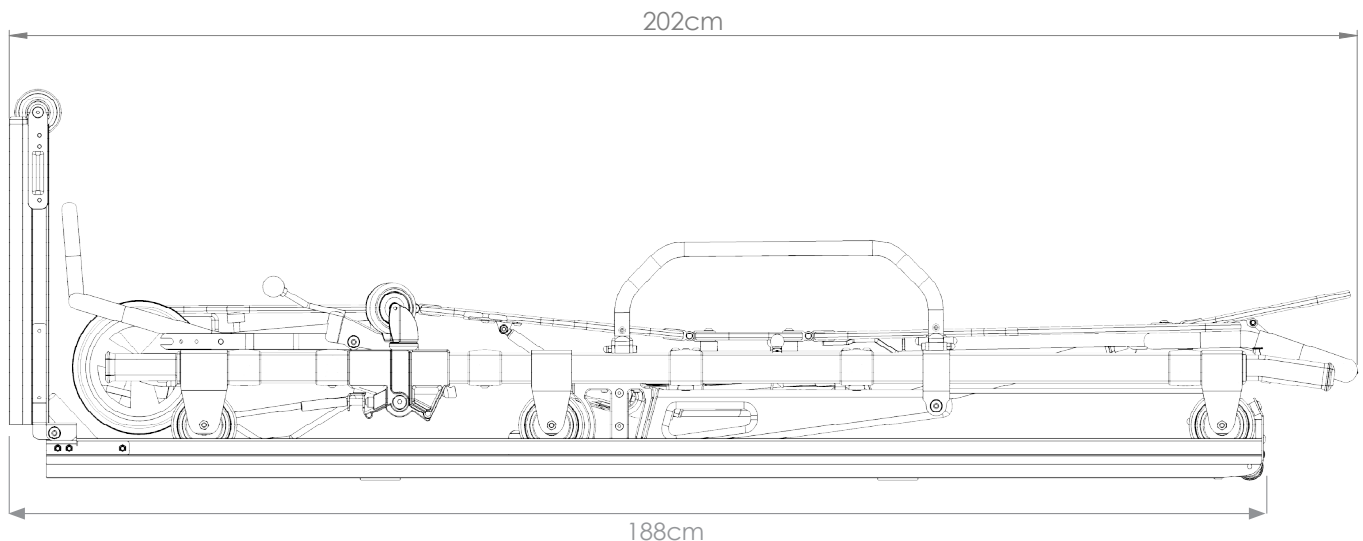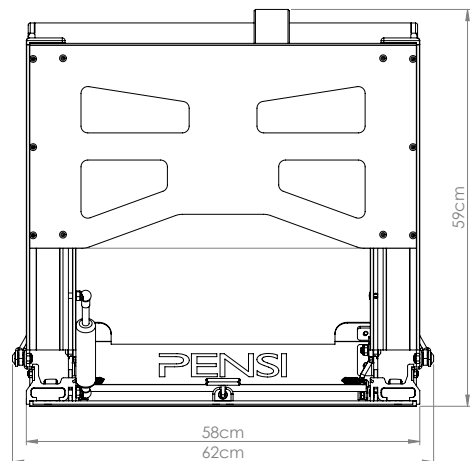

2.5 Kuljetus ja varastointi

Tarkasta heti tuotteen saavuttua ja ennen mahdollista varastointia että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksessa. Jos havaitset vahinkoja, ota välittömästi yhteyttä kuljetusyhtiösi reklamaatiotilanteessa. Ota myös yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan vaurioiden arvioimiseksi ja korjaamiseksi.

Varastoi tuote kuivassa ja pölyttömässä tilassa yli +10 C asteen lämpötilassa, suojattuna suoralta auringonvalolta. Varastoinnin jälkeen tarkasta aina tuotteen oikeanlainen toiminta ennen käyttöönottoa. Puhdista ja voitele tuotteen liikkuvat osat ohjeiden mukaisesti, jos tuote on ollut varastoituna yli kaksi (2) kuukautta.



HUOMIO

Älä varastoi tuotetta pitkiä aikoja alle 0 °C asteessa.

2.6 Vakiovarusteet

Pensi kiinnityskiskostolla ei ole vakiovarusteita.

2.7 Lisävarusteet

Pensi kiinnityskiskostolla ei ole lisävarusteita.

Käytä aina Pensi kiinnityskiskoston kanssa tieliikenneajoneuvossa Pensi 2000MA monitoimipaareja.


2.8 Kliiniset hyödyt

Pensi kiinnityskiskoston suunniteltu kliininen hyöty on:

- Ammattimainen hoito- ja kuljetushenkilöstö saa paareilla olevan potilaan lastattua tieliikenneajoneuvoon ja kuljetettua tieliikenneajoneuvossa turvallisesti ja ergonomisesti.

2.9 Sarjanumeron sijainti

Pensi kiinnityskiskoston sarjanumero sijaitsee laitteen etupäässä olevassa tyyppikilvessä kohdassa **SN XXXXX** (kuva alla).

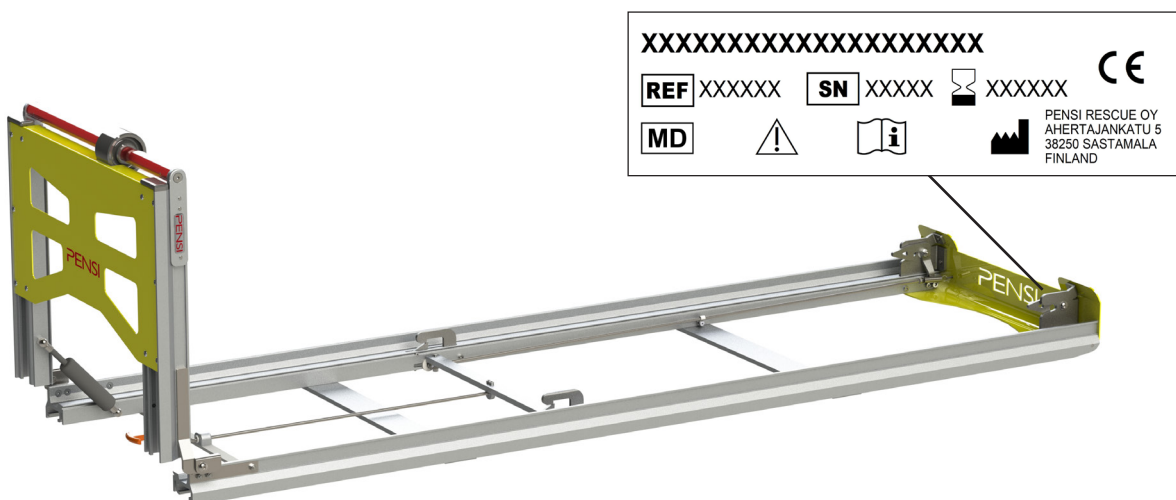

3. LAITTEEN KÄYTTÖ

3.1 Ennen käyttöä

Lue nämä ohjeet huolellisesti.

Kouluta kaikki Pensi kiinnityskiskoston käyttäjät Pensi 2000MA monitoimipaarien ja kiinnityskiskoston käyttöön.

Käyttäjän tulee noudattaa käyttäjäorganisaation ohjeita henkilökohtaisten suojainten käytöstä (esimerkiksi suojakäsineet, hengityssuojaimet ja turvajalkineet).

Tarkasta ettei tuote ole vaurioitunut kuljetuksessa tai varastoinnissa.

Käytä kiinnityskiskostoa tieliikenneajoneuvossa vain valmistajan ohjeiden mukaisesti tieliikenneajoneuvoon kiinnitettynä. Ota tarvittaessa yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Pensi kiinnityskiskoston asentajan tulee varmistaa, että kiinnityskiskoston kaikki toiminnot ovat käytettävissä ajoneuvon sisällä, ja että kiskoston ympärille jää tarpeeksi tilaa paarien säätöjä varten.

Aseta tuote käyttökieltoon jos havaitset turvallisuutta vaarantavan vian tai puutteen ennen kiinnityskiskoston käyttöä. Ota yhteyttä koulutettuun huoltohenkilöön ja tarvittaessa jälleenmyyjään tai valmistajaan korjataksesi laitteen ennen käyttöä.

Tee kiinnityskiskostolle tässä ohjeessa kuvatut määräaikaishuollot ja tarkistukset. Käyttäjäorganisaation tulee dokumentoida ja tallentaa tuotteelle tehdyt huollot/tarkistukset.



VAROITUS

Käytä Pensi kiinnityskiskostoa vain siihen tarkoitukseen mitä tässä ohjeessa on kuvattu.

Kiinnityskiskoston väärä käyttö voi aiheuttaa vahinkoja potilaalle, käyttäjälle tai laitteelle.

Muutosten tekeminen kiinnityskiskostoon voi aiheuttaa vaurioita ja vahinkoa. Käytä kiinnityskiskostoa vain sellaisena kuin Pensi on ne suunnitellut.

Poista liikenneonnettomuudessa ollut tai maksimikäyttöään saavuttanut kiinnityskiskosto käytöstä. Kiinnityskiskoston omistaja vastaa käytöstä poistosta, esimerkiksi poistamalla kiinnityskiskostosta tyyppikilven ja merkitsemällä kiinnityskiskoston käytöstä poistetuksi. Lisäksi jos tyyppikilven kaikki tiedot eivät ole luettavissa, tulee kiinnityskiskosto asettaa käyttökieltoon.



VAROTOIMI

Älä ylikuormita tuotetta. Ylikuormitus voi aiheuttaa kiinnityskiskostoon näkymättömän vaurion, joka voi myöhemmin aiheuttaa vahingon.

3.2 Ergonomia

Kiinnitä erityistä huomiota työergonomiaan tuotteen käyttöönottokoulutuksessa, koska sen avulla vähennetään käyttäjien tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja tapaturmariskejä.


Pensi 2000MA parien käyttöönottokoulutus tulee olla läpikäyty parien ohjeen liitteen 1. mukaisesti ennen parien ja kiinnityskiskoston käyttöä.



VAROTOIMI

Toimi yli 150 kg painavien potilaiden kanssa erityistä varovaisuutta noudattaen, vähintään kahden käyttäjän toimesta.

Pensi kiinnityskiskoston tulee olla lastausasennossa oheisen kuvan mukaisella korkeudella.

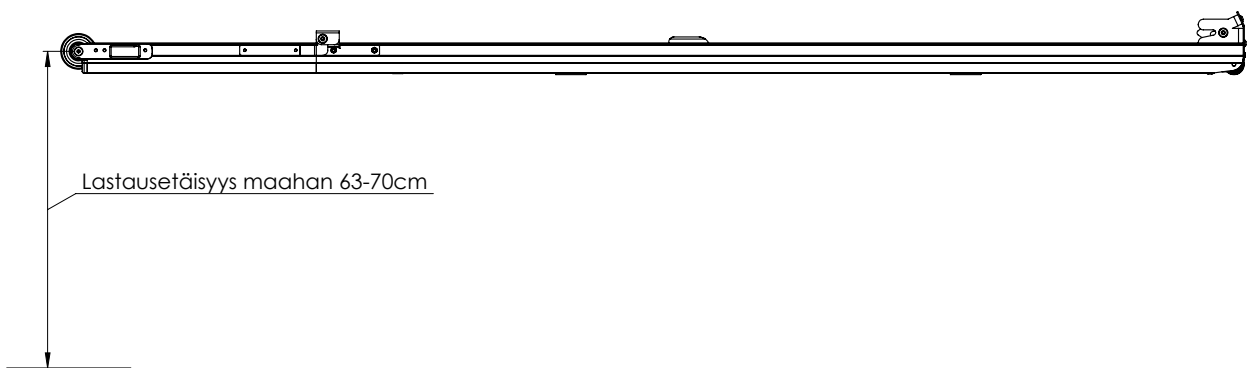

3.3 Käyttö- ja huoltokoulutus

Käyttäjäorganisaation tulee järjestää käyttökoulutus kaikille jotka käyttävät kiinnityskiskostoa. Kouluttajalla tulee olla hyvät tiedot ja taidot kiinnityskiskoston oikeasta käytöstä. Käyttäjäorganisaation tulee säilyttää yksityiskohtaiset tiedot kaikkien käyttäjien koulutuksista Pensi 2000MA monitoimipaarien käyttöohjeen liitteen 1 mukaisesti.

Käyttäjäorganisaation tulee järjestää erillinen koulutus myös vastuullisille huoltohenkilöille tuotteen käytöstä sekä huollosta. Vastuullisella huoltohenkilöllä tulee olla riittävät tekniset tiedot ja taidot vastaavien tuotteiden huollosta. Teknisiä huolto- ja voiteluohjeita on ehdottomasti noudatettava. Tämä mahdollistaa kiinnityskiskostoon merkityn maksimikäyttöiän ja minimoi huollosta ja seisokeista syntyviä kustannuksia.

Käyttäjäorganisaation tulee säilyttää yksityiskohtaiset tiedot kaikista koulutetuista huoltohenkilöistä sekä parien huoltotöistä ja tarkastuksista. Suosittelemme huollon teettämistä Pensillä.

Löydät huoltolistan tämän ohjeen liitteenä.




VAROITUS

Kiinnityskiskostoa saavat käyttää ja huoltaa ainoastaan koulutuksen saaneet ammattimaiset käyttäjät ja ammattimaiset huoltajat.

3.4 Kiinnityskiskoston käyttö ja toiminnot

Ennen potilastilanteissa toimimista, varmista että kiinnityskiskosto on asennettu alla olevan piirustuksen mukaisesti koritehtaan hyväksymiin ja ohjeistamiin kiinnityspisteisiin. Varmista myös, että parin kaikki suunnitellut säädöt ovat toteutettavissa myös ajoneuvon sisällä. Parit on esimerkiksi saatava täysin suoraksi ajoneuvon sisällä. Huomioi asennuksessa myös potilaat, jotka ovat paareja pidempiä.

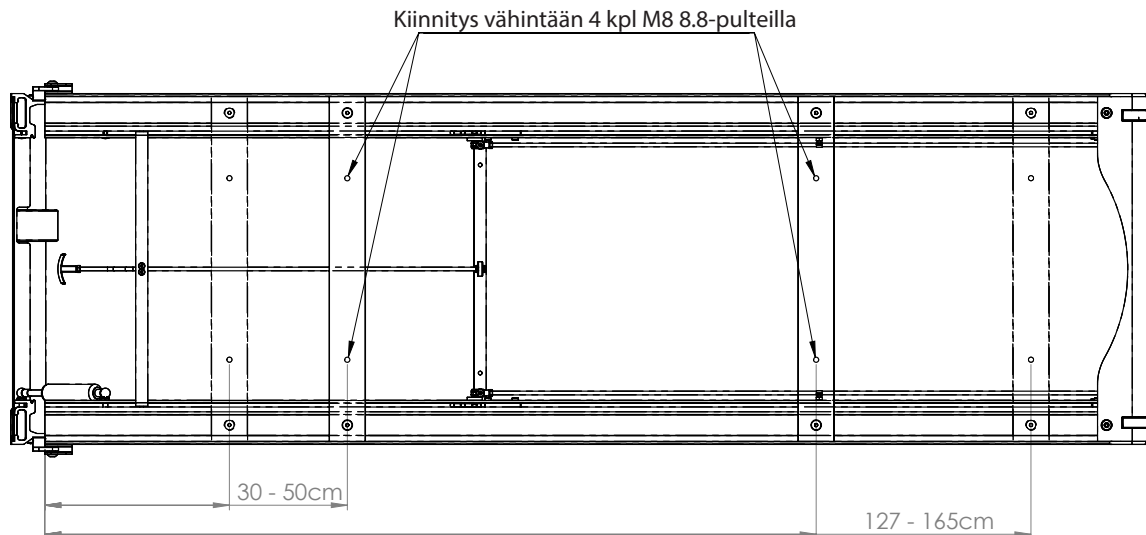

Suorita kiinnityskiskoston tilapäinen asennus ja irrotus ajoneuvon aina koritehtaan ohjeiden mukaisesti, koritehtaan toimittamilla kiinnikkeillä.

Älä nosta kiinnityskiskostoa osista, joissa lukee "ÄLÄ NOSTA TÄSTÄ". Kiinnityskiskoston lukituksen vapautus saattaa vaurioitua.

Paarien lukitseminen kiinnityskiskostolle

1. Parit lukkiutuvat automaattisesti kiinnityskiskostoon, työnnettäessä ne kokonaan kiskostolle.
2. Vaimenna potilaaseen kohdistuvia liikkeitä avaamalla lukitukset ennen paarien työntämistä lukkoihinsa. Varmista tämän jälkeen, että parit ovat lukittuneet kunnolla vetämällä paareja hieman taaksepäin.
3. Nosta lastausramppi pystyasentoon

Kiinnityskiskoston lukitus vapautetaan pitämällä vapautinvipua auki (kuva) ja vetämällä paareja taaksepäin.



Tarkempi ohjeistus paarien lastauksesta löytyy Pensi 2000MA monitoimipaarien käyttö- ja huolto-ohjeesta.



VAROITUS

Tarkista paarien lukittuminen kiinnityskiskostoon ennen liikkeellelähtöä.



VAROTOIMI

Käsittele kiinnityskiskostoa varoen. Mikäli jokin osa tai toiminto ei toimi kevyesti tai suunnitellusti, ota välittömästi yhteys ammattimaiseen huoltohenkilöön tai tarvittaessa valmistajaan.

4. VARAOSAT

Käyttäjän vaihdettava varaosa on rampin kaasujousi. Ota tarvittaessa yhteys Pensiin.

Rampin kaasujousi,
tuotenumero 0240500



4.1 Varaosien vaihto

Varaosien vaihto-ohjeet toimitetaan varaosien yhteydessä.



VAROITUS

Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia Pensi kiinnityskiskostossa. Muiden kuin valmistajan hyväksymien varaosien käyttö voi aiheuttaa vaurioita ja vaaratilanteita. Takuu ei korvaa vaurioita muiden kuin valmistajan ilmoittamien varaosien käytöstä.

5. PUHDISTUS

Puhdista tai tarvittaessa pese sekä desinfioi Pensi kiinnityskiskosto jokaisen potilaan jälkeen. Noudata puhdistuksessa, pesussa ja desinfioinnissa organisaatiosi ohjeita.


Pensi kiinnityskiskoston saa puhdistaa ainoastaan ammattimainen käyttäjä tai huoltohenkilö.

Käytä suojalaseja, hengityssuojainta ja suojakäsineitä aina puhdistaussasi ja pestessäsi kiinnityskiskostoa.

Älä käytä ultraääntä tai höyrypuhdistusta kiinnityskiskoston puhdistukseen.

Kaikissa tapauksissa veden lämpötila on oltava alle +50 °C.

Puhdista ja voitele kiinnityskiskoston pesun jälkeen voitelua vaativat pääkomponentit (kuva).

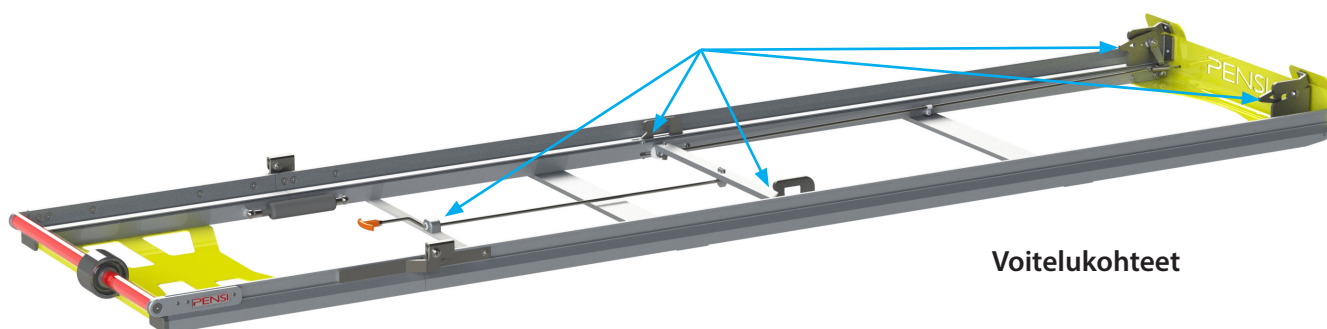

6. KUNNOSSAPITO JA HUOLTO


Pensi kiinnityskiskostoa saavat huoltaa ja korjata tämän ohjeen liitteen huoltolistan mukaisesti ainoastaan näihin tehtäviin koulutetut henkilöt:


- Ammattimainen hoito- tai kuljetushenkilöstö: päivittäinen puhdistus, desinfiointi ja pääkomponenttien voitelu ohjeen mukaan
- Ammattimainen huoltohenkilöstö: kuukausittainen/vuosittainen tarkastus, puhdistus ja huolto, niiden varaosien vaihto joihin koulutettu.

Tarkemmat ohjeet on kuvattu alla *Säännölliset tarkastukset ja huollot* kohdan taulukoissa.

Huolto tulee dokumentoida käyttäjäorganisaation toimesta. Liitteen huoltolista on tarkoitettu vuosihuoltoon. Käyttäjäorganisaation on säilytettävä kaikki vuosihuoltodokumentit, sekä annettava ne kiinnityskiskoston mukana jos se myydään.

Tuotteessa on uutena seuraavan huollon ajankohdan osoitava tarra. Käyttäjäorganisaation tulee huolehtia vastaavan merkinnän lisäämisestä tuotteeseen aina vuosittaisen huollon ja tarkastuksen yhteydessä.

 **SEURAAVA VUOSI-TARKASTUS VIIMEISTÄÄN**

Vuosi: kk: 1 2 3 4 5 6
20XX 7 8 9 10 11 12 



VAROITUS

Huoltamattoman tai tarkastamattoman tuotteen käyttö on kielletty.

Säännölliset tarkastukset ja huollot



VAROTOIMI

Huoltohenkilöstön pitää suorittaa huoltotoimenpiteet suojakäsineet käsissä.

Ainoastaan säännöllinen huolto mahdollistaa Pensi kiinnityskiskoston turvallisen käytön merkittävään maksimikäyttöikään saakka.

Päivittäin

Kiinnityskiskoston osa	Toimenpide
Kiinnityskiskoston toiminnot	<p>Ammattimaisen käyttäjän kokeilee kiinnityskiskoston toiminnot päivittäin sekä silmämääräisesti tarkastaa kiinnityskiskoston osien kunnon ja kiinnityksen. Tarvittaessa pääkomponenttien puhdistus ja voitelu.</p> <p>Mikäli ammattimainen käyttäjä havaitsee osien kulumista tai kiinnityskiskosto ei toimi suunnitellusti, tulee käyttäjän asettaa kiinnityskiskosto käyttökieltoon ja toimittaa se ammattimaisen huoltohenkilön huollettavaksi.</p>

Kerran kuukaudessa

Kiinnityskiskoston osa	Toimenpide
Kiinnityskiskoston toimintojen perusteellinen kokeilu, tarkastus ja puhdistus.	<p>Ammattimaisen käyttäjän tai huoltohenkilön kokeilee ja tarkastaa perusteellisesti kiinnityskiskoston kaikki toiminnot sekä varmistaa kaikkien osien kunnon ja kiinnityksen. Erityisesti ruuvikiinnitykset sekä mahdollisesti kuluneet tai rikkoutuneet osat.</p> <p>Mikäli ammattimainen käyttäjä havaitsee osien kulumista tai kiinnityskiskosto ei toimi suunnitellusti, tulee käyttäjän asettaa kiinnityskiskosto käyttökieltoon ja toimittaa se ammattimaisen huoltohenkilön huollettavaksi.</p> <p>Kuukausittainen tarkastus/huolto on dokumentoitava ja dokumentit säilytettävä käyttäjäorganisaatiossa.</p>

Kerran vuodessa

Kiinnityskiskoston osa	Toimenpide
Liitteen mukainen huoltolista	<p>Ammattimainen huoltohenkilö suorittaa perusteellisen vuositarkastuksen ja huollon tämän ohjeen liitteen huoltolistan mukaan. Vuositarkastus ja huolto on dokumentoitava ja dokumentit säilytettävä käyttäjäorganisaatiossa.</p> <p>Vuositarkastuksen jälkeen ammattimaisen huoltohenkilön on lisättävä seuraavasta vuositarkastuksesta muistuttava merkintä kiinnityskiskostoon, jotta ammattimainen käyttäjä voi varmistua, että kiinnityskiskosto on asianmukaisesti ajallaan tarkastettu ja huollettu.</p> <p>Seuraava vuositarkastus, josta merkintä kiinnityskiskostossa kertoo, tulee suorittaa viimeistään tarkastusta vastaavana kuukautena seuraavana vuonna.</p>

7. KÄYTÖSTÄ POISTO JA HÄVITTÄMINEN

Käytöstä poisto

Poista Pensi kiinnityskiskosto käytöstä, kun siihen merkitty viimeinen käyttöpäivä on saavutettu.

Poista Pensi kiinnityskiskosto käytöstä myös jos se on ollut liikenneonnettomuudessa.

Kiinnityskiskoston sen hetkinen omistaja vastaa käytöstä poistosta.

Tee käytöstä poisto esimerkiksi poistamalla kiinnityskiskostosta tyyppikilpi ja merkitsemällä kiinnityskiskosto käytöstä poistetuksi.

Älä myy käytöstä poistettua Pensi kiinnityskiskostoa eteenpäin.

Ota tarvittaessa yhteys Pensiin.

Hävittäminen

Pensi kiinnityskiskoston hävittämisestä vastaa sen hetkinen omistaja.

Voit toimittaa Pensi kiinnityskiskoston Pensille kierrätettäväksi.

Jos haluat hävittää laitteen omatoimisesti, noudata paikallisia jätteenkäsittelymääräyksiä ja ohjeita. Halutessasi voit irrottaa metalli- ja muoviosia kierrätykseen.

8. TAKUUEHDOT

1. Näitä takuehtoja sovelletaan kaikkiin Pensi Rescue Oy:n myymiin Pensi -tuotteisiin sekä niiden lisävarusteisiin, ellei keskinäisissä sopimuksissa ole toisin sovittu.
2. Tavarán vastaanottaja on velvollinen tarkastamaan tavarán huolellisesti heti vastaanottaessaan toimituksen ja ilmoittamaan mahdollisista virheistä myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus tulee tehdä kahden (2) viikon kuluessa siitä kun ostaja havaitsi virheen.
3. Takuu-aika on kaksi (2) vuotta. Takuu koskee myyjän toimittamissa tuotteissa mahdollisesti ilmeneviä valmistus- asennus- tai materiaalivikoja. Myyjä voi harkintansa mukaan korjata ja/ tai hyvittää virheelliseksi toteamansa tuotteen tai sen osan. Myyjä vastaa ainoastaan ostajan tuotteesta maksamaan kauppahintaan saakka vahingosta, joiden näytetään johtuvan tuotteesta olevasta virheestä taikka myyjän sopimusrikkomuksesta. Takuu ei koske normaalia ajan mittaan tapahtuvaa kulumista.
4. Tuotteisiin ei saa tehdä takuu-aikana muutoksia joita valmistaja ei ole etukäteen hyväksynyt, eikä tuotteesta saa takuu-aikana käyttää muita kuin valmistajan hyväksymiä lisävarusteita, tarvikkeita tai varaosia.
5. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheellisestä käytöstä, käytöstä vastoin tuotteen käsittely- tai käyttöohjeita, virheellisestä varastoinnista, puutteellisesta huollosta, ilman valmistajan lupaa tehdyistä muutoksista, muiden kuin valmistajan ilmoittamien varaosien käytöstä, liikenne- onnettomuudesta tai muista tarkastusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä. Takuu ei myöskään korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen ylisuuresta kuormittamisesta. Takuun perusteella ei korvata seisonpäiviä, muita välillisiä kuluja ja vahinkoja, kulutusosia (esim. parien pyörä), rahtikustannuksia, päivärahoja ja matkakustannuksia.
6. Mikäli takuu-aikana ilmennyt vika on korjautettu ulkopuolisella, valmistaja korvaa aiheutuneet kustannukset vain siinä tapauksessa, että tästä on sovittu etukäteen valmistajan kanssa.
7. Takuukorjaus suoritetaan, kun virheellinen tuote tai sen vaurioitunut osa on toimitettu tehtaallemme tarkistettavaksi, tai se on edustajamme toimesta arvioitu ja vaurio on todettu takuukorjauksen piiriin kuuluvaksi. Palautuksen liitteenä tulee olla kirjallinen selvitys vian laadusta ja synnystä sekä selvitys siitä, milloin tavara on toimitettu vastaanottajalle.
8. Takuuhuollon tai -korjauksen edellytyksenä on, että reklamaation yhteydessä esitetään tosite ostopäivästä.
9. Palautusehdot
 - Palautuksesta on aina sovittava myyjän kanssa, sopimatta palautettua tavaraa ei hyvitetä
 - Tavara on palautettava kohtuullisen ajan kuluessa, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa toimituspäivästä tai virheen ilmenemisestä.
 - Tavara on palautettava valmistajalle Sastamalaan.
 - Palautettava tavara tulee olla siinä kunnossa kun myyjä on sen toimittanut, jotta tavara voidaan ottaa vastaan ja hyvittää.
 - Palautuksen yhteydessä on toimitettava tosite ostopäivästä.
 - Palautusrahti on maksettava lähetysasemalla.

Asiakkaan nimi	Sarjanumero
Sijaintipaikka / yksikkötunnus	Seuraava huolto
Yhteyshenkilön nimi	Puhelin no.

Tarkastusmerkinnät:	ok	ei ok			
1. Paarin lukituksen toiminta					
2. Lastausramppi: Kunto ja toiminta					
3. Lastausrampin kaasujousi: Kunto ja toiminta					
4. Puhdistus					
5. Rasvaus: Lukitusosat					

Tarkastuksessa todetut viat ja puutteet korjattu, kohta no. :

Vialliset osat vaihdettu, kohta no.:

Seuraavat kohdat eivät sisälly/sovellu tähän laitteeseen:

Lisätiedot :

Laite on huollon jälkeen käyttökunnossa

Laitteen käyttö ei ole turvallista ennen kuin edellämainitut osat on vaihdettu (ks. Lisätiedot)

Tarkastajan allekirjoitus	Päivämäärä
Nimenselvennös	

PENSI

Made in Finland



PENSI

*Pensi Rescue Oy
Ahertajankatu 5
38250 Sastamala*

*Puh. 03 512 5600
E-mail: pensi@pensi.fi
www.pensi.fi*